

StrataXRT®

## Dùng trong phòng ngừa và điều trị viêm da do viêm da do tia xạ



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  
& TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
**HOÀNG ĐỨC**

GDP-GSP  
ISO 9001:2008

 **Stratapharma**  
Switzerland

Số công bố: 220004100/PCBB-HCM

## StrataXRT

Dùng trong phòng ngừa và điều trị viêm da do tia xạ

Một loại băng vết thương linh hoạt tiếp xúc hoàn toàn để phòng ngừa và điều trị viêm da do tia xạ. StrataXRT là một loại gel bán khóa ẩm, tự khô và trong suốt.

Khi được sử dụng theo chỉ dẫn, StrataXRT khô lại tạo thành một lớp bảo vệ có thể thấm khí và không thấm nước, giúp hydrat hóa, bảo vệ các vùng da bị tổn thương và vết thương nông khỏi sự xâm nhập của các tác nhân gây kích ứng và vi sinh vật.

StrataXRT có thể thoa trực tiếp cho viêm da do tia xạ, bề mặt da bị tổn thương, vết thương nông và bỏng cấp độ một và hai.

## StrataXRT tác dụng như thế nào?

StrataXRT khi khô tạo thành một lớp băng gạc mỏng, linh hoạt, giúp ngậm nước và bảo vệ các vùng da bị tổn thương.

StrataXRT không có giá trị pH đo được nên không ảnh hưởng đến lớp axit mỏng manh của da.

StrataXRT giúp thúc đẩy môi trường ẩm phù hợp cho quá trình liền thương cho các vết thương và bỏng nông, lan rộng.

StrataXRT là một loại gel trong suốt, tự khô, không dính, liên kết nhẹ với lớp da bị tổn thương. Gel StrataXRT có tính kìm khuẩn và trở.

Môi trường chữa lành vết thương ẩm này thúc đẩy quá trình tái biểu mô nhanh hơn và làm giảm đáng kể phản ứng viêm cấp tính của da với sự bong vảy khô và ứ đọng do dùng liệu bức xạ và bỏng độ một và độ hai.

Trong quá trình bong vảy khô, StrataXRT bảo vệ lớp biểu bì mỏng manh và duy trì tính toàn vẹn của da, ngăn các lớp ngoài cùng bong tróc quá mức.

Trong quá trình bong vảy ẩm, StrataXRT bảo vệ lớp mô da khỏi thương tổn lâu dài, đồng thời giúp duy trì môi trường ẩm cho quá trình liền thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

StrataXRT là thích hợp cho các vùng da có diện tích lớn và có đường viền như ngực, mặt và cổ, lưng và vùng chậu, cũng như các khớp và vùng có lông mà không cần phải cạo.

## Mục đích sử dụng / Chỉ định

StrataXRT được dùng làm giảm viêm nhẹ như da bị kích ứng, bong tróc, lột da, ngứa, khô.

Đối với viêm nặng hơn, StrataXRT làm giảm đau, đỏ, giảm nhạy cảm với nhiệt và giúp giảm nhẹ vùng da bị viêm.

StrataXRT được nghiên cứu để dùng cho tất cả viêm da do tia xạ, da nhiễm độc và đang bị kích ứng, da bị bỏng và vết thương nông, bao gồm vết thương do:

- Xạ trị
- Bỏng độ 1 và độ 2

StrataXRT có thể được dùng cho vết thương nông, bỏng và vùng da đang bị kích ứng.

StrataXRT cũng có thể được dùng phối hợp với các trị liệu khác nhằm giúp cải thiện kết quả điều trị. StrataXRT không chứa cồn, paraben hoặc hương liệu, trong suốt và không mùi. StrataXRT có thể được dùng phối hợp với một băng bảo vệ thứ hai hoặc không.

StrataXRT thích hợp cho trẻ em và người có da nhạy cảm. Mỗi ống StrataXRT chỉ được dùng riêng cho mỗi bệnh nhân.

## Cách dùng

Trong lần đầu sử dụng ống 20g, hãy tháo nắp, cắt đầu vòi của ống và đóng nắp sau khi sử dụng.

Trên các ống 50g, tháo nắp, sau đó là lớp niêm phong bảo vệ và đóng nắp sau khi sử dụng.

Đảm bảo rằng vết thương bề ngoài da bị ảnh hưởng phải sạch và khô.

Nhẹ nhàng lau khô càng nhiều dịch tiết thừa hoặc dịch vết thương càng tốt trước khi thoa gel.

Bôi một lớp StrataXRT rất mỏng trực tiếp lên vùng da tổn thương và để gel khô.

StrataXRT nên được sử dụng một hoặc hai lần mỗi ngày cho các khu vực bị tổn thương hoặc theo lời khuyên của bác sĩ.

Sau khi khô, có thể bôi thêm một lớp kem chống nắng, mỹ phẩm và mặc quần áo.

Để có kết quả tốt nhất StrataXRT nên được duy trì tiếp xúc liên tục với da (24 giờ một ngày / 7 ngày một tuần).

Khi bôi đúng cách lên các vùng da tiếp xúc, StrataXRT sẽ khô sau 5-6 phút. Nếu mất nhiều thời gian để khô, có thể bạn đã bôi quá nhiều. Nhẹ nhàng loại bỏ phần thừa bằng khăn giấy hoặc gạc sạch và để quá trình làm khô tiếp tục.

## Thời gian điều trị khuyến cáo

StrataXRT được khuyến cáo dùng dự phòng sau liệu xạ trị đầu tiên và nên tiếp tục dùng tối thiểu 60-90 ngày (24 giờ một ngày / 7 ngày một tuần) sau khi xạ trị, hoặc cho đến khi không có cải thiện thêm.

Đối với viêm da do bức xạ mạn tính, khuyến cáo dùng liên tục cho đến khi không có cải thiện thêm. Liệu lượng StrataXRT cần dùng?

Gel StrataXRT là công thức duy nhất cần lượng sản phẩm ít cho mỗi lần bôi so với kem làm ẩm hoặc thuốc mỡ bảo vệ.

- StrataXRT 20 g (0,75 oz) đủ dùng điều trị cho vùng da  $12 \geq 15$  cm, ( $5 \geq 6$  inch) hai lần/ ngày trong 30 ngày.
- StrataXRT 50 g (1.75 oz) đủ dùng điều trị cho vùng da  $12 \geq 15$  cm, ( $5 \geq 6$  inch) hai lần/ ngày trong 75 ngày.

## Thận trọng

- Chỉ dùng ngoài da.
- Không nên để StrataXRT tiếp xúc với mắt.
- StrataXRT không nên được sử dụng trên các loại thuốc bôi ngoài da trừ khi được bác sĩ khuyên dùng.
- StrataXRT có thể làm ố quần áo nếu chưa khô hoàn toàn. Nếu vết bẩn xảy ra, phải giặt khô để loại bỏ mà không làm hỏng vải.
- Để bảo quản đúng cách, vui lòng đậy chặt ống bằng nắp.
- Nếu bệnh viêm da do tia xạ của bạn có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc không lành sau 30 ngày kể từ ngày sử dụng sản phẩm đầu tiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Nếu bị kích ứng, ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không thích hợp cho vết thương tiết nhiều dịch, vết thương dài và sâu hoặc vết bỏng độ 3.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng sau ngày hết hạn (EXP) in trên ống. Ngày hết hạn (EXP) không thay đổi khi đã mở ống.
- Không sử dụng nếu ống bị hỏng.
- Sản phẩm vô trùng đến khi mở ống

## Thành phần

Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

StrataXRT®

## Dùng trong phòng ngừa và điều trị viêm da do viêm da do tia xạ



Thiết bị Y tế loại B