



Thiết bị Y tế **chuyên dùng** cho

Trơn, Khỏe vùng âm đạo



Gel bơm phụ khoa
02ml

Hydroxyethylcellulose

Bôi trơn + dưỡng ẩm

Metyl Paraben
Cúc Matricaria
Hồng Damascena

Kháng nấm + kháng khuẩn

Acid Lactic
Natri Hydroxit

Tăng lợi khuẩn dưỡng ẩm,
trung hòa axit,
cân bằng PH

CÔNG DỤNG

- ☾ Vệ sinh, diệt khuẩn, sạch mùi đến 99%
- ☾ Cân bằng độ PH, thúc đẩy nồng độ pH tự nhiên, muối và axit lactic
- ☾ Tăng co bóp, bôi trơn, cải thiện tình trạng lãnh cảm
- ☾ Hỗ trợ chống viêm - huyết trắng - ức chế nấm ngứa 99%



GEL BƠM PHỤ KHOA - GEL IN TRƠN KHỎE

Giới thiệu

90% Không khỏe - Viêm nhiễm, mất cân bằng PH. Và cũng 90% vùng kín của chị em bị "ô nhiễm", do xà phòng, nước giặt, không phải ai cũng biết. Bên cạnh đó có 40% vùng kín chị em không trơn, lãnh cảm, khô rát, mất hạnh phúc. Gel In - dạng ống bơm sâu 5-8cm vào phụ khoa, giúp môi trường cân bằng PH 4.11, sạch, thoáng, mát liên tục, đồng thời bôi trơn, giảm khô rát và đặc biệt hỗ trợ điều trị viêm nhiễm, nấm ngứa.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Xé túi đựng theo hình răng cưa trên bao bì.

Bước 2: Rút 1/3 thân ống cầm phần đuôi, tay kia bẻ, tháo nút bịt đầu ống.

Bước 3: Rút hết thân ống, đưa từ từ 5cm ~ 8cm vào âm đạo, đồng thời tay nhấn nút pit tống đẩy gel vào.

Bước 4: Vui lòng sử dụng nó ở một vị trí thoải mái, sau đó bỏ ống gel đi.

Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài làm sạch sâu âm đạo và không sử dụng nó trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ngoài âm đạo.

Nếu bạn lo lắng về việc bị đờng sau khi sử dụng, vui lòng sử dụng nó cùng với băng vệ sinh hoặc lớp lót.

Nên sử dụng mỗi ngày 01 ống gel để duy trì sạch, trơn và khỏe cho vùng kín.

Thành phần

Purified Water, Milk Protein Glycereth-26, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed Collagen, Metyl Paraben, Natri Hydroxit, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Matricaria Chamomilla Flower Extract, Oculata Extract (and) Pullulan (and) Aqua (and) Phenoxyethanol (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate.

Đối tượng sử dụng

- ☾ Nữ giới chăm sóc sức khỏe vùng kín mỗi ngày - cần làm SẠCH khuẩn.
- ☾ Nữ giới điều trị các vấn đề viêm nhiễm, nấm ngứa- cần làm KHỎE.
- ☾ Nữ giới cần bôi trơn vùng kín trong chuyện sinh hoạt tình dục – cần bôi TRƠN.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng nếu bạn đã từng bị Hội chứng sốc độc tố (TSS) trong quá khứ.

Nếu bạn đang mang thai hoặc bị viêm cục bộ hay các bất thường khác, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp gồm 05 ống Gel, Mỗi ống 02 ml.

HẠN DÙNG: 36 Tháng kể từ ngày sản xuất.