

VỀ VINCISMILE

Khay niềng răng trong suốt VinciSmile, là một giải pháp thay thế cho hệ thống mắc cài truyền thống, giúp chỉnh đều răng cho bệnh nhân theo một cách tinh tế, hiệu quả và thoải mái. Với 4 công nghệ cải tiến, chứng nhận CE về vật liệu nhựa có thiết kế đàn hồi, thẩm mỹ và có thể tháo lắp dễ dàng. Tất cả được kết hợp hoàn hảo trong 1 sản phẩm – Vincismile.

Với 10+ bản quyền, 28+ bằng sáng chế, và đội ngũ R&D được dẫn dắt bởi các giáo sư A*STAR (Singapore Agency for Science, Technology and Research - Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore) tạo nên khả năng cạnh tranh cốt lõi của VinciSmile - tiên phong là VinciSmile Pro, thuật toán giúp sắp xếp chính xác các chuyển động của răng theo một trình tự cụ thể và cho phép bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng xem kết quả dịch chuyển răng cuối cùng trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm của chúng tôi và thiết kế nụ cười theo thẩm mỹ cá nhân.

Trung tâm thiết kế Vincismile (Vincismile Design Center - VDC), được dẫn dắt bởi các tiến sĩ, thạc sĩ về chỉnh nha, và các chuyên gia nha khoa, cung cấp các kỹ thuật chỉnh nha đáng tin cậy, cho ra các kế hoạch điều trị 3D hiệu quả cao và thiết bị chỉnh nha tùy chỉnh thích ứng với hình thái và giải phẫu răng của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban chuyên gia VinciSmile Trung Quốc (VinciSmile Expert Committee China - VECC), hoạt động như một nền tảng nghiên cứu, đã thu thập các chuyên gia chỉnh nha và chuyên gia trong và ngoài nước để thúc đẩy các đổi mới trong điều trị chỉnh nha.

ƯU ĐIỂM:

Trong suốt

Khay chỉnh nha VinciSmile được làm từ vật liệu polymer trong suốt, khó nhận biết được khi bạn đang đeo khay.

Thoải mái

Thuật toán của phần mềm VinciSmile có thể tính toán một cách chính xác số lượng dịch chuyển răng thích hợp và tránh kích ứng mô mềm miệng có thể gây ra bởi khung và dây của mắc cài truyền thống.

Có thể tháo rời

Khay chỉnh nha VinciSmile có thể tháo rời được. Do đó bệnh nhân có thể tháo ra trước và trong khi vệ sinh răng miệng, giúp giảm tỷ lệ bị sâu răng và các bệnh răng miệng khác.

PHẠM VI ĐIỀU TRỊ CỦA VINCISMILE



Móm



Cắn Hở



Cắn Sâu



Răng Thưa



Răng Chèn Chức



Hô

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG 6 BƯỚC

BƯỚC 1	Khám tổng quát Kiểm tra lâm sàng + điều trị cơ bản + chụp phim/ hình ảnh
BƯỚC 2	Lên kế hoạch điều trị Nộp form điều trị + file STL + phim/ hình ảnh
BƯỚC 3	Duyệt kế hoạch điều trị 3D Review và chỉnh sửa kế hoạch + phê duyệt kế hoạch 3D
BƯỚC 4	Sản xuất khay In khay và đóng gói thành phẩm
BƯỚC 5	Đeo khay Thực hiện các thao tác lâm sàng + hướng dẫn đeo khay cho bệnh nhân
BƯỚC 6	Hoàn thành điều trị Phiếu xác nhận + ảnh và phim x-quang + lấy dấu + đeo hàm duy trì



DỤNG CỤ HỖ TRỢ




Gắn attachments

Bác sĩ cần gắn một số attachment bằng composite trùng với màu sắc răng lên bề mặt các răng cần dịch chuyển để hỗ trợ lưu giữ răng hoặc một số chuyển động răng nâng cao như xoay hoặc trôi.



Mài kê (IPR)

Mài kê là một trong những kỹ thuật thường sử dụng để điều trị răng chen chúc, bằng cách mài mỏng đi một khoảng cách nhất định trên bề mặt gần của một hoặc nhiều răng để tạo thêm khoảng trống dịch chuyển răng.

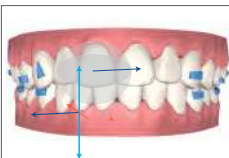

Thay thế/Tinh chỉnh

Bác sĩ có thể lựa chọn tinh chỉnh để thiết kế lại một số chuyển động của răng trên kế hoạch 3D hiện tại hoặc áp dụng thêm một số bước điều chỉnh bổ sung sau khi điều trị để có được kết quả lâm sàng tốt hơn cho bệnh nhân.



Hàm duy trì

Bác sĩ có thể đề nghị bệnh nhân mang hàm duy trì sau khi điều trị chỉnh nha để tránh tái phát.

HỎI ĐÁP

1. Dụng cụ niềng răng này có thật sự trong suốt không?

Khay niềng răng VinciSmile được làm từ vật liệu polymer trong suốt, khó nhận thấy được khi bạn đang điều trị chỉnh nha.

2. Liệu trình thường kéo dài bao lâu?

Thông thường thời gian cho một liệu trình điều trị bằng khay niềng răng trong suốt VinciSmile tương đương với sử dụng mắc cài truyền thống. Thời gian cụ thể sẽ được xác định bởi mức độ nghiêm trọng của tình trạng lệch lạc và sự tuân thủ của bệnh nhân đối với hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi hoàn thành điều trị chỉnh nha, bệnh nhân nên đeo hàm duy trì trong một khoảng thời gian nhất định theo tư vấn của bác sĩ điều trị.

3. Răng có đau khi mang niềng răng trong suốt VinciSmile?

Bạn sẽ cảm thấy đau nhẹ trong khoảng 2-3 ngày đầu khi mang khay mới, điều này là hết sức bình thường và không thể tránh khỏi. Đây là dấu hiệu cho thấy khay đang hoạt động và tạo lực dịch chuyển. Cơn đau này sẽ dần dần biến mất sau vài ngày.

4. Deo khay có ảnh hưởng đến phát âm của tôi không?

Phát âm của bạn có thể bị ảnh hưởng trong 1 đến 3 ngày đầu, và sẽ dần trở lại bình thường khi bạn đã làm quen dần với khay.

5. Tôi nên chú ý gì trong quá trình điều trị?

Bạn nên tháo khay trong vài trường hợp cần thiết nhưng phải đảm bảo đeo khay ít nhất 22 giờ đồng hồ mỗi ngày trong suốt quá trình điều trị. Chúng tôi khuyến cáo không nên uống thức uống có màu trong khi đeo khay để tránh bị sâu răng và răng bị ố màu, không nên uống đồ uống quá nóng hay quá lạnh để tránh làm khay bị biến dạng.

VINCISMILE GROUP LLC
Add: 18229 Railroad St, City of Industry, CA 91748, USA
Email: info@vincismile.com
www.vincismile.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA VINCISMILE TẠI VIỆT NAM
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ YTT
MST: 0316440381
Địa chỉ: 742/5C Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@ytt.com.vn



SMILE AS MUCH
AS YOU WISH

www.vincismile.com

1.000 TỜ A4