



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM  
Lô B5 KCN Tam Điệp – TP. Tam Điệp – T. Ninh Bình  
<http://www.mpv.vn> – Email: [info@mpv.vn](mailto:info@mpv.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH SỬ DỤNG MỘT LẦN

### I. Mục đích sử dụng của sản phẩm

Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần dùng để truyền dịch, truyền thuốc vào cơ thể.

### II. Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra bao bì, không sử dụng khi bao gói bị hở.
2. Mở, xé túi đựng dây theo vết cắt chỉ dẫn, kiểm tra tình trạng sản phẩm.
3. Thao tác mở đuôi dây tránh bị gập gãy, xoay bộ điều chỉnh lưu lượng về vị trí đóng.
4. Mở nắp chụp bảo vệ kim chai, cắm kim chai vào bình dịch truyền treo trên giá.
5. Dùng hai ngón tay bóp liên tiếp 1 đến 2 lần lên bình đếm giọt (bầu lọc) sao cho dịch truyền chảy xuống  $\frac{1}{2}$  bình thì dừng lại.
6. Lắp kim vào cụm khớp nối luerlock có màng lọc dịch.
7. Điều chỉnh bánh xe để dịch truyền chảy qua dây ra ngoài nhằm đẩy hết khí trong ống dây ra ngoài, sau đó điều chỉnh bánh xe để khóa lại.
8. Thực hiện quá trình truyền dịch và kiểm soát tốc độ truyền dịch bằng bộ phận điều chỉnh lưu lượng.
9. Kết thúc quá trình truyền thực hiện khóa bộ điều chỉnh lưu lượng, thực hiện rút kim truyền.

#### Chú ý:

- Trường hợp bị bọt khí còn sót lại trong ống dây:
  - + Nếu ở gần bình đếm giọt trên van điều chỉnh lưu lượng thì di chuyển cụm van lưu lượng vượt cho bọt khí thoát hết lên bầu đếm giọt.
  - + Nếu ở bên dưới van, tiếp tục mở rộng van lưu lượng để dịch truyền chảy nhanh xuống dưới đuôi hết bọt khí ra.

### III. Chỉ định./ Chống chỉ định

1. Chỉ định: Truyền dịch/thuốc qua đường tĩnh mạch.
2. Chống chỉ định:

- Không được dùng để truyền máu và/hoặc chế phẩm máu.
- Không dùng cho truyền thuốc nhạy cảm với ánh sáng.

### IV. Cảnh báo và thận trọng

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên môn.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao gói bị hỏng. Sử dụng ngay sau khi mở bao gói sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm nếu các đầu bảo vệ thiết bị bị lỏng, tháo rời.
- Không lật ngược hoặc lắc bình đếm giọt trong quá trình sử dụng.

- Chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng. Sản phẩm đã qua sử dụng phải hủy bỏ theo quy định tiêu hủy vật tư y tế.

- Không tiệt trùng lại.

- Không tái chế sản phẩm. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của sản phẩm.

**V. Bảo quản**

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, không tiếp xúc với nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

- Hạn sử dụng sản phẩm: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Hào*