



## NỘI DUNG QUẢNG CÁO

### Trang thiết bị y tế Gel phụ nữ Femifit Kháng khuẩn

1. Tên sản phẩm: Gel phụ nữ Femifit Kháng khuẩn
2. Hình ảnh sản phẩm:



4. Thành phần: Hexamidine Diisethionate, Xà sàng tử, Hoàng liên, Chiết xuất lá Trà không, Chiết xuất Tía tô, Carrageenan, Chiết xuất Rau má, Chiết xuất hạt Đậu xanh, Allantoin, Bisabolol, Isopropyl Methylphenol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Phụ liệu vừa đủ 3g.

#### 5. Mục đích sử dụng:

Cung cấp dịch ẩm tạo môi trường cho âm đạo. Hỗ trợ trong các vấn đề về phụ khoa:

- Hỗ trợ làm sạch và khử mùi hôi vùng kín, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng: viêm nhiễm phụ khoa, nấm ngứa, khí hư, huyết trắng.
- Hỗ trợ làm giảm cảm giác khô rát, khó chịu vùng kín.
- Hỗ trợ duy trì độ ẩm và độ pH tự nhiên của vùng kín.

#### 6. Đối tượng sử dụng:

Người bị nhiễm nấm âm đạo, đặc biệt là nấm Candida albican.

Người bị nhiễm khuẩn đường sinh dục.

Người muốn vệ sinh vùng âm đạo và hỗ trợ cải thiện các vấn đề mùi hôi âm đạo.

Phụ nữ bị khí hư, huyết trắng, ngứa, đau rát,...do viêm nhiễm đường niệu sinh dục.

### 7. Hướng dẫn sử dụng:

- Rửa tay trước và sau khi sử dụng sản phẩm.
- Bước 1: Rửa sạch vùng kín bằng dung dịch vệ sinh hoặc nước sạch.
- Bước 2: Lấy bút thụt ra khỏi màng bọc và tháo nắp.
- Bước 3: Nhẹ nhàng đưa tối đa đầu bút thụt vào âm đạo trong tư thế thoải mái nhất.
- Bước 4: Bóp từ từ cho đến hết dịch trong bút, cố gắng giữ dịch trong âm đạo.

### 8. Lưu ý, cảnh báo sản phẩm:

#### \* Lưu ý:

- Mỗi lần chỉ sử dụng 1 bút duy nhất.
- Không rửa lại sau khi dùng.
- Sử dụng 1-2 bút/ngày tùy theo mức độ bệnh.
- Sử dụng liên tục ít nhất 5 ngày để đạt hiệu quả tối đa.

#### \* Chống chỉ định:

Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

#### \* Cảnh báo và thận trọng:

Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì thiết bị y tế bị hư hỏng.

9. Số lưu hành TTBYT: 250000026/PCBB-HY

10. Số XNQC TBYT: 02/2025/XNQC-HARUCIN

11. Xuất xứ: Việt Nam

#### 12. Tên tổ chức công bố, sản xuất, phân phối:

- Tên tổ chức công bố : CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION CARE

Địa chỉ: Thôn Mão Xuyên, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

-Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tên tổ chức được ủy quyền phân phối : CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC HARUCIN

Địa chỉ : Số 2 ngõ 418 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

