


# CELLTEK NUCLEAR STAIN SOLUTION

Code: CT-012

DUNG DỊCH NHUỘM TẾ BÀO

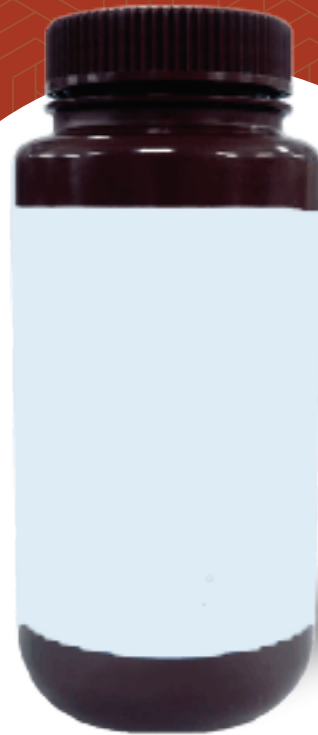

## GIỚI THIỆU



### Mục đích sử dụng

CELLTEK Nuclear Stain Solution (CT-012) được thiết kế cho việc nhuộm (nhân) và phân biệt các loại tế bào trong xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou.



### Mô tả sản phẩm

- CELLTEK Nuclear Stain Solution là thuốc nhuộm nhân của tế bào, được cung cấp dưới dạng sử dụng trực tiếp.
- CELLTEK Nuclear Stain Solution tối ưu trong nhuộm và phân biệt các loại tế bào trong xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou.



### Thông số kỹ thuật

- *Cảm quan:* Chất lỏng đồng nhất có màu đỏ đen, không có chất lơ lửng, không đóng cặn. Có mùi đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ.
- *Khả năng nhuộm màu:* Các tế bào sau khi nhuộm cho nhân có màu xanh tím.
- *Thành phần:* Ethylene glycol, Hematoxylin, Sodium iodate, Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate.
- *Quy cách:* 500mL/Chai.
- *Hạn sử dụng:* 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
- *Bảo quản:* Nhiệt độ 15 – 30 , tránh ánh sáng trực tiếp.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CELLTEK

Số 15, Thôn Thượng Thụy, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



0973643532



celltekn@gmail.com




ISO:9001



ISO:13485

## ► Chuẩn bị trước khi thực hiện

Hóa chất nhuộm Papanicolaou (PAP) theo sơ đồ sau:

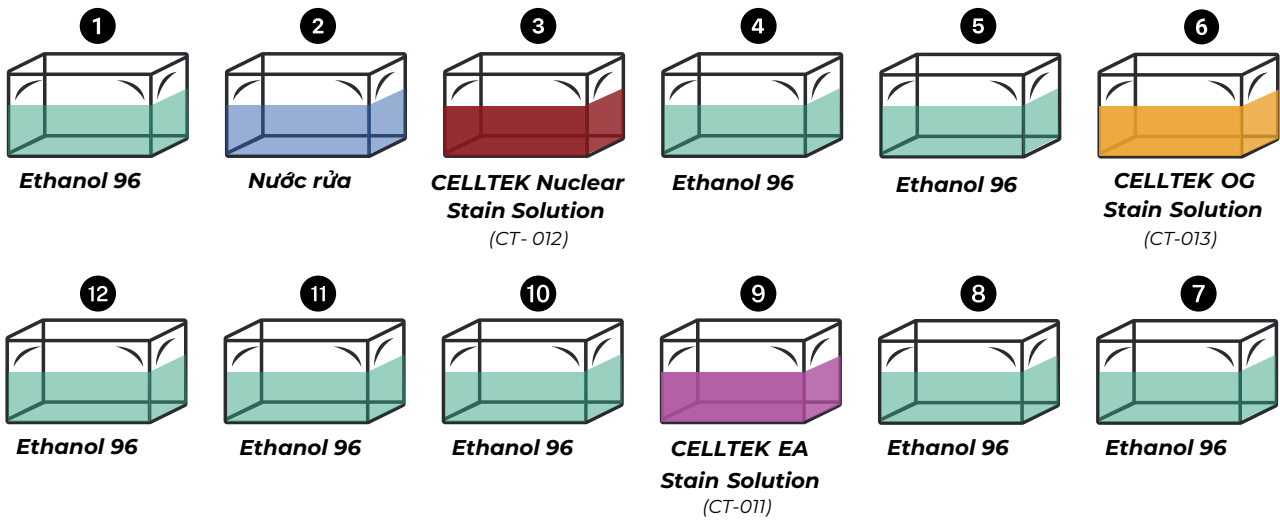

**Dụng cụ khác không cung cấp:** Bộ dụng cụ nhuộm, Lam kính.  
**Hóa chất khác không cung cấp:** CELLTEK Nuclear Stain Solution (CT-012), CELLTEK EA Stain Solution (CT-011), Ethanol 96, Nước rửa\*.

**Lưu ý:**

- Nước rửa có thể dùng nước máy pH  $\geq 8$ , hoặc các dung dịch xanh hóa có tính kiềm như Scott's water, Ammonia 0,05% solution hoặc saturated lithium carbonate.
- Các thuốc nhuộm được cung cấp dưới dạng Ready-to-use, chỉ cần lắc đều thuốc nhuộm và đổ vào hộp với thể tích phù hợp khi dùng. Bảo quản trong chai kín tối màu sau sử dụng.

## ► Chuẩn bị mẫu:

- Pap nhúng dịch (Liquid-based Pap Test):** Mẫu dịch phết cổ tử cung sẽ được tiến hành thu nhận và xử lý theo quy trình của *CELLTEK Cervical Cytology Medium Kit (CT-010)*. Mẫu dịch phết được chuyển trên lam kính bằng máy phết lam và cốc lọc tương ứng.
- Pap truyền thống:** Mẫu dịch phết cổ tử cung sau khi thu nhận sẽ được phết trực tiếp lên trên lam kính.

## ► Quy trình nhuộm Papanicolaou (PAP):

- Bước 1:** Cố định mẫu bằng Ethanol 96 ở hộp ① trong vòng 15 phút.
- Bước 2:** Nhúng 5 lần lam kính sau cố định vào nước rửa ở hộp ②.
- Bước 3:** Nhuộm nhân bằng CELLTEK Nuclear Stain Solution ở hộp ③ trong vòng 1 phút.
- Bước 4:** Nhúng 5 lần lam kính sau nhuộm nhân vào nước máy ở hộp ④.
- Bước 5:** Nhúng lam kính lần lượt vào Ethanol 96 ở hộp ④ và ⑤. Mỗi hộp nhúng 5 lần.
- Bước 6:** Nhuộm tế bào chất bằng CELLTEK OG Stain Solution ở hộp ⑥ trong vòng 1 phút.
- Bước 7:** Nhúng lam kính lần lượt vào Ethanol 96 ở hộp ⑦ và ⑧. Mỗi hộp nhúng 5 lần.
- Bước 8:** Nhuộm tế bào chất bằng CELLTEK EA Stain Solution ở hộp ⑨ trong vòng 2 phút.
- Bước 9:** Nhúng lam kính lần lượt vào Ethanol 96 ở hộp ⑩, ⑪ và ⑫. Mỗi hộp nhúng 5 lần.
- Bước 10:** Để khô, bôi dầu khoáng và quan sát trực tiếp dưới kính hiển vi.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT - CHI NHÁNH LONG HẬU



Nhà xưởng 6.07 và 5.02, Lô L2, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.

☎ 0903 307 258

✉ sales@abtn.com

🌐 <http://www.abtn.com>



ISO:9001 ISO:13485