

Forest Leaf

Dung dịch đa năng có citrate

Loại bỏ protein hiệu quả

Forest Leaf EX là dung dịch đa năng có citrate để vệ sinh tất cả các loại kính áp tròng mềm (kính áp tròng thường, kính thay thế thường xuyên, kính dùng một lần, v.v.)



Vì sao việc loại bỏ protein được đảm bảo



- **Sự bám dính của protein vào kính áp tròng**
Protein là một thành phần của nước mắt, bám dính vào kính áp tròng, đặc biệt là kính áp tròng hydro-gel thông thường, do tương tác tĩnh điện.
- **Liên kết giữa protein và cặn canxi**
Quá trình này liên quan đến việc protein liên kết với cặn canxi trong nước mắt
- **Citrate cô lập canxi và làm yếu protein**
Citrate có trong công thức dung dịch xâm nhập vào cấu trúc liên kết này và cô lập canxi, do đó làm yếu lắng cặn và làm bong protein khỏi bề mặt kính áp tròng.

Forest Leaf

Dung dịch đa năng có citrate

Loại bỏ protein hiệu quả

Thành phần

Natri clorua, natri citrate, poloxamer, hydroxypropyl methylcellulose, Natri edetate và polyhexamethylene biguanide 0,0001%

Công dụng

Citrate trong công thức giúp loại bỏ protein hiệu quả khỏi kính áp tròng dùng một lần, không cần sử dụng đến viên làm sạch bằng enzym.

Chỉ định (HDSD)

Dành cho mắt thường đeo kính áp tròng hydrogel và kính áp tròng thông thường

Đối với kính áp tròng thông thường sử dụng dung dịch đa năng để bảo dưỡng, nên sử dụng thêm dung dịch làm sạch bằng enzym.

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH SEED CONTACT LENS VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6F, Số 81+83, Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất tại Tây Ban Nha, bởi DISOP, S.A.
Không sử dụng Forest Leaf EX như thuốc nhỏ mắt và phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng khi dùng sản phẩm.