



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM
Lô B 5 KCN Tam Điệp – Phường Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình
Tel: 02293. 777 .588 – <http://www.mpv.vn> – Email: info@mpv.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIM LUÔN TĨNH MẠCH

I. Mục đích sử dụng của sản phẩm

Tạo đường tiêm, truyền dịch/thuốc..., lấy mẫu máu qua tĩnh mạch hoặc tạo điều kiện thuận lợi để đặt các thiết bị tiếp cận mạch máu trong thời gian ngắn.

II. Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra tình trạng bao bì, hạn sử dụng của sản phẩm.
2. Chuẩn bị vị trí đặt và khử trùng theo quy định bệnh viện.
3. Xé bao gói lấy sản phẩm, kiểm tra tình trạng sản phẩm.
4. Giữ kim chắc chắn và an toàn tại đốc kim, tháo nắp chụp bảo vệ kim.
5. Giữa đốc ống thông, xoay đốc kim làm lỏng ống thông và kim. Đưa ống thông về vị trí ban đầu.
6. Đưa kim vào tĩnh mạch, quan sát máu xuất hiện tại buồng chứa.
7. Hạ thấp góc kim, nhẹ nhàng luồn ống thông vào tĩnh mạch, rút kim, loại bỏ theo quy định.
8. Đóng nắp đầu nối ống thông hoặc kết nối với thiết bị thích hợp. Cố định ống thông bằng băng vô trùng.
9. Sử dụng theo chỉ định bác sĩ. Lưu ý: Ấn chặt ven trước khi tháo kết nối với đốc ống thông để ngăn ngừa rò rỉ máu. Vệ sinh thường xuyên bằng dung dịch muối đẳng trương để đảm bảo an toàn, ngăn ngừa viêm tĩnh mạch.
10. Rút ống thông và loại bỏ theo quy định sau khi sử dụng.

III. Chỉ định/ Chống chỉ định

- Chỉ định:
Tiêm, truyền dịch, thuốc, máu, các thành phần của máu,...
- Chống chỉ định:
Rối loạn chảy máu, nhiễm trùng tại chỗ, đốt cháy chi, hoại tử mô, ...
Chống chỉ định dùng kim luồn tĩnh mạch trong quá trình chụp MRI.
Không dùng cho chất lỏng có độ nhớt cao.
Không sử dụng với bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thiết bị.

IV. Cảnh báo

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn, hạn sử dụng được thể hiện trên bao gói trực tiếp.
- Không được sử dụng khi bao bì hở, rách, trong bao bì/sản phẩm có tạp, bụi bẩn, via, gờ.

- Chỉ sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên môn và chỉ được sử dụng trong các cơ sở y tế.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần. Không tiết trùng lại hoặc tái sử dụng. Tiêu hủy sau khi sử dụng theo đúng quy định tiêu hủy vật tư y tế.
- Loại bỏ nếu để kim chạm vào bề mặt không vô khuẩn.
- Xoáy, vặn chặt các đầu kết nối để đảm bảo không bị rò rỉ, bong tuột trong quá trình sử dụng.
- Không luân lại một phần hoặc toàn bộ kim, ống thông khi đã thực hiện thao tác rút kim, ống thông.

V. Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hạn sử dụng sản phẩm: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hào