

VẬT LIỆU KIỂM SOÁT XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG HbA1c HÀNG NGÀY / HÀNG THÁNG

1. Mục đích sử dụng

Các sản phẩm khay thử được sử dụng để kiểm tra hệ thống quang học và vận hành của máy xét nghiệm.

2. Các loại khay

Khay kiểm soát hằng ngày: HemoCue® HbA1c 501 Daily Check Cartridge

Khay kiểm soát hằng tháng: HemoCue® HbA1c 501 Monthly Check Cartridge

3. Hướng dẫn bảo quản

Khay kiểm soát cần được bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trong quá trình bảo quản:

- Bảo quản khay ở nhiệt độ từ 2 - 32°C (36 - 90°F) và độ ẩm < 90%
- Luôn giữ khay trong bao bì bảo vệ để tránh trầy xước có thể ảnh hưởng đến kết quả
- Nếu khay được bảo quản trong tủ lạnh, cần đưa đến nhiệt độ phòng trước khi sử dụng (khoảng 1 giờ)

4. Cảnh báo/ thận trọng

- Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro
- Không sử dụng khay kiểm soát sau hạn sử dụng
- Không sử dụng khay kiểm soát nếu bảo quản không đúng hoặc bị bụi bẩn, trầy xước hoặc hư hỏng.

5. Vật liệu kiểm soát hằng ngày

Khi sử dụng vật liệu kiểm soát hằng ngày:

- Một lần/ ngày trước khi xét nghiệm mẫu
- Sau khi chạy máy xét nghiệm
- Sau khi có tin nhắn thông báo lỗi (Er1 hoặc Er3)




Vật liệu kiểm soát hằng ngày chứa một khay và không có thuốc thử (đóng trong túi)

Thời gian sử dụng: Cho đến hạn sử dụng in trên nhãn khay.

* Hướng dẫn sử dụng vật liệu kiểm soát hằng ngày

1. Mở nắp của máy xét nghiệm Hemocue HbA1c 501



2. Nhấn nút  để bật trạng thái 'Daily check cartridge'



3. Đặt khay vật liệu kiểm soát hàng ngày vào khe cắm.



4. Đóng nắp. Xét nghiệm tự động bắt đầu.



5. Sau một phút, tin nhắn 'OK' hoặc 'Er 2' sẽ xuất hiện.



6. Sau khi hoàn thành xét nghiệm, lấy khay ra.



Lưu ý: Nếu có tin nhắn báo lỗi, lặp lại xét nghiệm

Không sử dụng máy xét nghiệm nếu có lỗi

Để thoát trạng thái kiểm soát hàng ngày, nhấn nút 

6. Vật liệu kiểm soát hằng tháng

Khay vật liệu kiểm soát hằng tháng



Túi thuốc thử cho kiểm soát hằng tháng



Khi sử dụng vật liệu kiểm soát hằng tháng:

- Một lần/ tháng trước khi xét nghiệm mẫu
- Khi nghi ngờ kết quả xét nghiệm không chính xác
- Sau khi có tin nhắn thông báo lỗi (Er 4 hoặc Er 5)


Vật liệu kiểm soát hằng tháng được sử dụng để kiểm soát máy xét nghiệm, chứa khay và túi thuốc thử, giống như khay thử xét nghiệm nhưng không có vùng chứa mẫu.

- Không tái sử dụng
- Không sử dụng vật liệu kiểm soát hằng tháng sau hạn sử dụng
- Nếu tái sử dụng vật liệu kiểm soát hằng tháng, máy sẽ hiển thị 'Er 14 – Không tái sử dụng'
- Vật liệu kiểm soát hằng tháng có thể mua từ nhà phân phối địa phương

* Hướng dẫn sử dụng vật liệu kiểm soát hằng tháng

1. Mở nắp của máy xét nghiệm Hemocue HbA1c 501




2. Nhấn nút  để bật trạng thái 'Monthly check cartridge'



3. Đặt khay vật liệu kiểm soát hằng tháng vào khe cắm khi hiển thị 'Monthly CHECK'



4. Trộn nhẹ nhàng túi thuốc thử bằng việc đảo ngược đầu từ trên xuống dưới 5-6 lần trước khi sử dụng

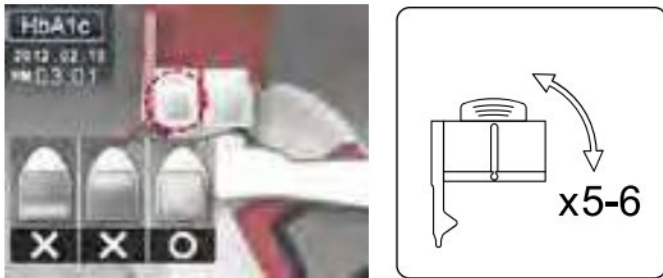

5. Đặt túi thuốc thử hăng tháng cẩn thận, khi hiển thị thông tin 'Insert reagent pack'



6. Đóng nắp. Xét nghiệm tự động bắt đầu.



7. Sau năm phút, tin nhắn 'OK' sẽ xuất hiện.




8. Sau khi hoàn thành xét nghiệm, lấy khay ra.



Lưu ý: Nếu có tin nhắn báo lỗi, lặp lại xét nghiệm

Không sử dụng máy xét nghiệm nếu có lỗi

Để thoát trạng thái kiểm soát hằng ngày, nhấn nút 

Các thông tin khác xin xem thêm tại hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.