

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ DUNG DỊCH KHỬ MÙI CƠ THỂ SIÊU SÌN 102

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty TNHH SX & TM Dược Mỹ Phẩm Phạm Gia Group. Địa chỉ: Số 1, ngõ 38 phố Đại Liêu, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm TTBYT	
1.1	Mô tả TTBYT	Dung dịch khử mùi cơ thể
1.2	Danh mục linh kiện, phụ kiện	Đóng chai, hộp 5 ml, 10ml, 15 ml ... theo yêu cầu của khách hàng
1.3	Mục đích sử dụng	Tăng thời gian quan hệ tình dục, khắc phục tình trạng xuất tinh sớm
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>Bước 1: Lắc đều lọ Siêu Sìn 102, nhỏ hoặc xịt 2-3 giọt. Bôi vòng tròn quanh vị trí quy đầu và rãnh quy đầu (tránh bôi vào lỗ tiểu). Sau đó xoa nhẹ nhàng 1-2 phút, cho đến khi dung dịch trên bề mặt da khô đi</p> <p>Bước 2: Đợi dung dịch ngấm trong khoảng 20-30-60 phút (1 giờ cho tình trạng bị xuất tinh sớm nặng, quan hệ dưới 3 phút hoặc tùy cơ địa), rồi đi rửa sạch (rửa bằng sữa tắm, xà bông càng tốt, cũng như không ảnh hưởng đến mùi vị của cuộc yêu)</p> <p>Bước 3: Chờ thêm 30 phút nữa để dung dịch phát huy hiệu quả cao nhất rồi bắt đầu quan hệ (có thể quan hệ luôn sau khi rửa sạch)</p>

Hải Phòng, ngày 08 tháng 8 năm 2025
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
PHẠM DUY CƯỜNG