



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **BƠM TIÊM SỬ DỤNG MỘT LẦN**

I. Mục đích sử dụng của sản phẩm

Bơm tiêm sử dụng một lần dùng để tiêm, hút hoặc bơm các chất lỏng từ lọ, ống tiêm và các bộ phận của cơ thể dưới bề mặt da.

II. Hướng dẫn sử dụng

- Xé bỏ túi theo vết cắt đã đánh dấu. Lấy sản phẩm ra khỏi túi vô trùng.
- Kiểm tra cảm quan sản phẩm.
- Kiểm tra liên kết kim và đốc kim bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ đảm bảo kim và đốc kim được liên kết chắc chắn.
- Giữ ống tiêm bằng một tay và cẩn thận tháo nắp khỏi kim tránh tiếp xúc với đầu kim sắc.
- Sử dụng bơm để tiêm, bơm hoặc hút chất lỏng từ lọ, ống tiêm hoặc các bộ phận của cơ thể dưới bề mặt da. Đuổi khí và đo liều lượng chính xác, căn chỉnh cạnh trên của gioăng trùng với vạch liều lượng trên thang đo của bơm.
- Sử dụng theo mục đích chẩn đoán, điều trị.

III. Chỉ định/ Chống chỉ định

- Chỉ định: Bơm tiêm sử dụng một lần dùng để bơm, tiêm, kiểm soát thuốc, pha thuốc,...
- Chống chỉ định: hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

IV. Cảnh báo và thận trọng

- Kiểm tra bao bì sản phẩm phải còn nguyên vẹn trước khi sử dụng. Không sử dụng khi bao gói bị hở, sản phẩm bị gãy, bần hoặc biến dạng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng EO và phải được sử dụng ngay sau khi mở bao gói.
- Chỉ sử dụng sản phẩm khi hạn sử dụng còn hiệu lực.
- Sử dụng 1 lần, không được tái sử dụng, dùng xong hủy bỏ theo quy định tiêu hủy vật tư y tế.
- Khi dùng với bơm tiêm điện, để tránh piston chuyển động tự do, đảm bảo piston được gắn chặt vào cần đẩy trước khi khởi động đường truyền.
- Sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên môn.

V. Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, không tiếp xúc với nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Hạn sử dụng sản phẩm: 5 năm kể từ ngày sản xuất. *Handwritten mark*

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM *Handwritten mark*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hào