



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tròng kính mắt

Sản phẩm được sử dụng như một dụng cụ hỗ trợ thị giác trong kính để khắc phục các khuyết tật về thị lực như cận thị và viễn thị

Bảo quản:

- Nên đặt kính với bề mặt lồi hướng lên trên hoặc tốt nhất nên để kính trong hộp khi không sử dụng để tránh trầy xước hoặc hư hại.
- Không để kính chung với dung môi hữu cơ, axit, chất kiềm và vật cứng.
- Không để kính trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao (ví dụ: trong xe ô tô dưới nắng), khi tắm hoặc xông hơi trong thời gian dài, vì có thể làm hỏng tính chất quang học và lớp phủ của kính

Mục đích sử dụng:

Dùng làm kính đeo mắt và điều chỉnh độ khúc xạ cận viễn, loạn

Hướng dẫn sử dụng:

- Cắt ráp vào gọng kính trước khi dùng
- Cách làm sạch kính
 - Rửa kính bằng nước hoặc dung dịch chuyên dụng, sau đó lau bằng khăn sợi mềm. Không dùng vật liệu cứng hoặc thô ráp để lau.
 - Để kính phát huy đúng chức năng, cần giữ cho tâm quang học của kính phù hợp với mắt bạn. Hãy đeo kính đúng vị trí trên khuôn mặt. Nếu có hiện tượng méo hình, nên đến bệnh viện mắt để kiểm tra kịp thời.

Cảnh báo và thận trọng

- Kính áp tròng không phù hợp với một số môn thể thao, đặc biệt là các môn thể thao chủ động.
- Tròng kính dễ bị bay hơi bởi nước nóng, thức ăn nóng, hơi lợi, thời tiết.
- Mắt kính dễ trầy xước và không thể sửa chữa được khi đã bị trầy xước (mặc dù mắt kính bền và có lớp phủ chống trầy xước)

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

- Sử dụng kính có độ không phù hợp có thể gây giảm thị lực, khó chịu hoặc nhức thị.
- Trong trường hợp cận thị, việc đeo kính có độ không chính xác có thể dẫn đến đau hoặc mỏi mắt, cũng như gây nhức đầu, chóng mặt.