

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### 1. Tên trang thiết bị y tế: Xịt lạnh

Tên thương mại: Star pro

Chủng loại: Cold Spray

### 2. Thành phần:

- Ethanol, Nước Ro, Methyl salicylate, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Glycerin.

### 3. Công dụng

- Hỗ trợ làm giảm các cơn đau tức thời do chấn thương cơ, khớp, dây chằng trong và sau vận động.

### 4. Hướng dẫn sử dụng

- Dùng đúng chai và lắc đều trước khi xịt.

- Dùng ngoài da. Xác định vị trí chấn thương, sau đó xịt 1 – 3 nhát rồi tiến hành massage trong vòng 5 phút để ức chế cảm giác đau.

- Nên dùng ngay sau khi chấn thương khoảng 6 ngày, sau đó chuyển sang dùng xịt nóng.

- Lưu ý: chỉ nên dùng sản phẩm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tối đa mỗi ngày không dùng quá 5 lần và không dùng liên tục quá 7 ngày.

### 5. Chống chỉ định, Cảnh báo và thận trọng:

#### - Chống chỉ định:

+ Không xịt đối với vết thương hở, thận trọng không để bay vào mắt hoặc những vị trí nhạy cảm.

+ Sản phẩm không phải là thuốc, hãy đi đến bác sĩ để được kiểm tra, thăm khám kỹ lưỡng..

#### - Cảnh báo và thận trọng:

+ Kiểm tra kỹ bao bì và hạn sử dụng của sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng. Không sử dụng cho các mục đích khác.

+ Phụ nữ có thai và cho con bú dùng theo hướng dẫn của chuyên gia.

+ Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

+ Ngưng sử dụng nếu có dấu hiệu dị ứng.

+ Để xa tầm tay trẻ em.

### 6. Bảo quản:

- Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt, tránh va chạm.

- Không để gần nơi chứa các hoá chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bề sản phẩm, vỡ bao bì đơn.

- Bảo quản ở nhiệt độ bình thường.

### 7. Hạn dùng:

- 03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.



**8. Quy cách đóng gói:**

- 100ml/ chai, 1500ml/chai, 200ml/ chai, 250ml/ chai, ... 1 chai/ hộp.
- Số lượng và quy cách đóng gói có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.

**9. Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY TNHH BNPHARMA**

**Địa chỉ:** Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

**10. Công ty sản xuất: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bidopharma USA – Chi Nhánh Long An**

**Địa chỉ:** Xưởng K2-1, KCN Tân Kim mở rộng, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Thọ*

