

**CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ SG .META**
Số: 021025/CKQC/SGMETA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

VĂN BẢN CÔNG KHAI

Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo trang thiết bị y tế

Kính gửi: Bộ Y tế



1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ SG .META
Mã số thuế: 0317812593

Địa chỉ: 147/6 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0914433886

Fax:

Email : tranha17695@gmail.com

Website:

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Số CMND/ Định danh/ Hộ chiếu: 030096015007

ngày cấp: 05/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0914433886

Điện thoại di động: 0914433886

3. Thông tin về trang thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:

- Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch nhỏ mắt

- Chủng loại: Taustin (Taurine 4%, 0.4m, 1ml No 10,20,30; 5ml, 10ml No 1,2,3)

- Mã sản phẩm (nếu có):

- Hãng sản xuất: Grotex LLC

- Nước sản xuất: RUSSIAN FEDERATION

- Số lưu hành: 250003271/PCBB-HCM

- Tính năng, tác dụng: Dung dịch được sử dụng để hỗ trợ tái tạo biểu mô , loạn dưỡng giác mạc sau mổ mổ, thủy tinh thể và cải thiện tổn thương bề mặt của mắt gây ra do một số nguyên nhân và/ hoặc bệnh

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ SG .META, 147/6 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có):

Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với trang thiết bị y tế như sau:

Nội dung dự kiến quảng cáo:

Taustin (Taurine 4%, 0,4ml/ 1ml No 10,20,30; 5ml/ 10ml No 1,2,3)

THÀNH PHẦN:

1 ml sản phẩm chứa:

Hoạt chất chính: Taurine - 40 mg.

Tá dược: Methyl parahydroxybenzoate - 1 mg, dung dịch natri hydroxit hoặc axit clohydric 0,25

M - đến pH 4,0 - 6,5, nước cất pha tiêm - đầy 1 ml.

CÔNG DỤNG:

- Taurine là một acid amin chứa lưu huỳnh được hình thành trong cơ thể trong quá trình chuyển hóa cysteine.
- Taurine có tác dụng kích thích quá trình phục hồi và tái tạo biểu mô tế bào trong các bệnh loạn dưỡng cũng như quá trình loại bỏ sự rối loạn chuyển hóa của tế bào mắt, nó thúc đẩy bình thường hóa chức năng của màng tế bào, kích thích năng lượng và trao đổi chất duy trì thành phần điện giải trong dịch tế bào do sự tích lũy của ion K^+ và Ca^{2+} .
- Dung dịch Taurine 4% được sử dụng hỗ trợ bệnh nhân điều trị loạn dưỡng giác mạc; viêm giác mạc, bệnh suy yếu và chấn thương mắt, đục thủy tinh thể (do tuổi già, bệnh tiểu đường, chấn thương, bức xạ); chấn thương giác mạc, viêm giác mạc (như là một chất kích thích các quá trình phục hồi do tổn thương giác mạc, bệnh nhân mổ mổ, loạn dưỡng giác mạc sau mổ, tái tạo biểu mô giác mạc trong viêm loét giác mạc cũng như loại bỏ sự rối loạn chuyển hóa của tế bào mắt), bình thường hoá chức năng màng tế bào, tối ưu hoá các quá trình tạo năng lượng và trao đổi chất), biểu hiện đầu tiên của bệnh tăng nhãn áp (kết hợp với β -blockers để cải thiện dòng chảy của dịch chất lỏng trong nhãn cầu). Phòng và phối hợp điều trị bệnh cận thị, khô mắt, làm giảm các triệu chứng khô mắt, nóng rát, mỏi mắt do khói bụi, máy điều hòa nhiệt độ, sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài, những người thường xuyên đeo kính áp tròng.

LIỀU DÙNG

- Hỗ trợ cận thị - nhỏ 1-2 giọt 2-4 lần
- Hỗ trợ trị bệnh đục thủy tinh thể - nhỏ 1-2 giọt 2-4 lần một ngày trong vòng 3 tháng.
- Hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa giác mạc, dùng với liều lượng như trên trong vòng 1 tháng.
- Hỗ trợ điều trị bệnh glôcôm góc mở nguyên phát (kết hợp với thuốc chẹn β) – nhỏ 1-2 giọt 2 lần một ngày trước khi sử dụng một trong các loại thuốc hạ huyết áp tại chỗ 15-20 phút, trong vòng 6 tuần, tiếp theo là nghỉ 2 tuần.

BẢO QUẢN

- Dung dịch cần bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng
- Nhiệt độ bảo quản dưới 30 °C
- Tránh xa tầm tay trẻ em
- KHÔNG** dùng sản phẩm đã quá hạn ghi trên bao bì.

Hình thức dự kiến quảng cáo:

Báo nói báo hình, Không phải báo nói báo hình, Hội thảo

Cơ sở cam kết:

1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hoàng