

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

## **VĂN BẢN CÔNG KHAI**

### **Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo thiết bị y tế**

#### **Kính gửi: Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế**

1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

Mã số thuế: 0316948231

Địa chỉ: 26/31/6 Đường số 7, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3 526 2468

Fax:

Email: registration.01@vl-groups.com

Website:

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trương Thị Phương Quỳnh

Số căn cước/Hộ chiếu: 079185014866 ngày cấp: 14/02/2019 nơi cấp: Cục cảnh sát

Điện thoại cố định: (028)3 526 2468 Điện thoại di động: 0909327516

3. Thông tin về thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:

- Tên thiết bị y tế: MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

- Chung loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm (nếu có): YE630CR

- Hãng sản xuất: Jangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co.,LTD

- Nước sản xuất: CHINA

- Số lưu hành: 240001226/PCBB-HCM

- Tính năng, tác dụng: Đo huyết áp điện tử được sử dụng trong chuẩn đoán tại nhà, phòng ngừa và kiểm soát về tăng/giảm huyết áp trong cơ thể.

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG, 26/31/6 Đường số 7, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có): Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng:

- Tư thế và trạng thái khi đo: Người dùng cần ngồi đúng tư thế: lưng thẳng tựa vào ghế, bàn chân đặt phẳng trên sàn nhà (không bắt chéo chân).

- Cần nghỉ ngơi thư giãn trước khi đo; không nên đo ngay sau khi vận động mạnh, ăn uống hoặc căng thẳng.

- Đảm bảo độ chính xác: Nếu cần đo nhiều lần, nên nghỉ ít nhất 2-3 phút giữa các lần đo để mạch máu trở lại trạng thái bình thường.

Điều kiện bảo quản:

- Môi trường lưu trữ: Tránh để máy ở nơi có nhiệt độ quá cao, quá thấp hoặc độ ẩm lớn.

- Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và những nơi có bụi bẩn.

- Bảo vệ thiết bị: Không để thiết bị va đập, rung lắc mạnh hoặc làm rơi.



- Vòng bút cần được giữ gìn cẩn thận, tránh làm rách hoặc gập xoắn túi khí bên trong.
  - Bảo trì dài hạn: Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, nên tháo pin ra để tránh tình trạng pin chảy nước gây hỏng mạch điện.
  - Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa máy tại nhà để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thiết bị.
- Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với thiết bị y tế như sau:

Nội dung dự kiến quảng cáo:

Mua 5 máy đo huyết áp YE630CR tặng 1 máy đo huyết áp YE630CR.

Hình thức dự kiến quảng cáo:

Báo nói báo hình, Không phải báo nói báo hình, Hội thảo

Cơ sở cam kết:

1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH