

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA LOA SOI TAI MŨI HỌNG DÙNG MỘT LẦN

1. Tên sản phẩm

- Tên: Loa soi tai mũi họng dùng một lần
- Loại: Dùng một lần, không tái sử dụng
- Đối tượng: Người khám & chẩn đoán tai, mũi, họng

2. Mục đích sử dụng

- + Khám tai ngoài
- + Quan sát màng nhĩ, ống tai
- + Soi mũi và hầu họng
- + Hỗ trợ chẩn đoán tai mũi họng trong y tế

3. Thận trọng

- ⚠ Sản phẩm dùng một lần — không được tái sử dụng
- ⚠ Không sử dụng nếu bao bì bị rách hoặc hư hại
- ⚠ Giữ sản phẩm tránh va đập, đè ép
- ⚠ Không vô trùng lại bằng dung dịch hóa học

4. Hướng dẫn sử dụng

A. Chuẩn bị trước khi soi

1. Rửa tay sạch hoặc sát khuẩn tay.
2. Mở gói sản phẩm ngay trước khi sử dụng.
3. Kiểm tra: thân soi, đầu tip, nguồn sáng hoạt động.

B. Thao tác khám

1) Soi tai

1. Giữ đầu bệnh nhân ổn định.
2. Nhẹ nhàng đưa đầu tip vào ống tai.
3. Quan sát màng nhĩ và ống tai trên thấu kính.
4. Không đẩy quá sâu.

2) Soi mũi

1. Đặt đầu tip vào lỗ mũi.
2. Xoay nhẹ để quan sát vách mũi và niêm mạc.

3) Soi họng

1. Bật đèn sáng.
2. Hướng ống soi nhẹ vào họng để quan sát amidan, niêm mạc.

C. Sau khi sử dụng

1. Tháo sản phẩm ra khỏi bệnh nhân.
2. Vứt ngay thiết bị vào thùng chứa chất thải y tế sắc nhọn/ nguy hại theo quy định.

5. Bảo quản

- Nhiệt độ bảo quản: 10°C – 30°C
- Độ ẩm: < 80%RH
- Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao

6. Kiểm tra chất lượng trước sử dụng

- ✓ Không rách bao bì
- ✓ Nguồn sáng hoạt động tốt
- ✓ Không cong vênh, hư hại

7. Xử lý sau khi dùng

Do là dụng cụ dùng một lần, phải loại bỏ theo quy định xử lý chất thải y tế:

- Phân loại & bỏ vào thùng chất thải y tế sắc nhọn
- Không vứt vào rác sinh hoạt

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tuấn