

CÔNG TY TNHH DP  
HOÀNG ANH

\*\*\*\*\*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Dung dịch xịt mũi**  
Chủng loại/mã sản phẩm: **NANO HQ BABY**

### 1. THÀNH PHẦN:

- Sodium chloride 0,9%
- Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol (EHGP) 0,2%
- Hương liệu
- Nước tinh khiết vừa đủ.

### 2. CÔNG DỤNG

- Vệ sinh hàng ngày để làm sạch, giúp mũi thông thoáng, giúp loại bỏ các tác nhân như bụi, ô nhiễm môi trường.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đưa nhẹ vòi xịt vào bên trong mũi cho vừa, xịt đều 2 bên mũi.

- Trẻ từ 6 tháng - 2 tuổi: Xịt 2-3 lần mỗi bên mũi, ngày 3-6 lần.
- Trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn: Xịt 3-5 lần mỗi bên mũi, ngày xịt 3-6 lần.

### 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

### 5. BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

### 6. HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



*Hoàng Tiến Hưng*  
GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Tiến Hưng*