

Dao cắt cơ vòng, loại V (Loại đầu tip có đường đi cho dây dẫn)
Dao cắt cơ vòng, loại V Preloaded (Loại đầu tip có đường đi cho dây dẫn)

CleverCut 3 V

Thiết kế C-Channel cải tiến để tăng hiệu quả



Thiết kế cải tiến cho phép thao tác hiệu quả hơn

CleverCut 3V


Kiểm soát dây dẫn linh hoạt

Một khe chạy dọc theo phần thân của vỏ bọc, thiết kế chữ C cho phép bác sĩ và phụ tá kiểm soát dây dẫn.



Thiết kế chữ C cho VisiGlide và VisiGlide 2

Thiết kế chữ C hỗ trợ thay ống thông một cách nhanh chóng đối với các thủ thuật dùng dây dẫn loại ngắn hoặc dây dẫn loại over-the-wire truyền thống. Nó được thiết kế để sử dụng kết hợp với dòng dây dẫn VisiGlide nhằm hỗ trợ việc thay thế dụng cụ một cách trơn tru.

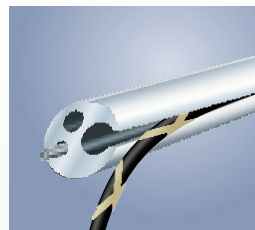

Hướng của dao ổn định

Đầu tip của CleverCut 3V mở rộng đến vị trí cong sẵn ổn định, hỗ trợ đưa ống thông vào nhú tá tràng và thực hiện cắt cơ vòng hiệu quả.

Lớp phủ CleverCut tăng cường độ an toàn

Lớp phủ CleverCut ở phần thân của dao cắt giúp bảo vệ mô xung quanh, đồng thời giảm nguy cơ tiếp xúc điện giữa dây và ống soi.

Lớp phủ CleverCut

Điểm đánh dấu vạch cân quang

Thiết kế đầu thuôn giúp dễ dàng thực hiện thao tác đưa ống thông vào

Các điểm đánh dấu nội soi

Thiết kế cổng thông minh hỗ trợ việc đưa dây dẫn


Cổng dây dẫn được thiết kế để việc đưa dây dẫn trở nên trơn tru và dễ dàng hơn



Có sẵn các loại đầu tip chuyên dụng

Loại uốn cong ngắn giúp định hướng ống thông chính xác hơn trong WGC*1

Việc điều khiển dao thông thường trong quá trình đưa ống thông vào có thể khó khăn khi vị trí gần đầu ống soi. Tuy nhiên, nhờ bán kính nhỏ của phần uốn cong ngắn trên loại dao này, nó có khả năng hỗ trợ định hướng ống thông chính xác hơn.

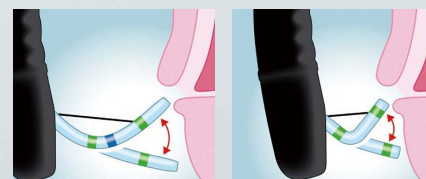


Mẫu thông thường*2

Loại uốn cong ngắn*3

Ví dụ về mã sản phẩm: ** KD-V411M-0720, ** KD-V412Q-0215

Loại đầu nghiêng giúp thực hiện đưa ống thông vào chính xác hơn

Với loại dao này, một rãnh ở phần cuối của vỏ bọc cho phép móc vào và nâng nhú tá tràng lên. Hơn nữa, dao có hình dạng nghiêng và thuôn dần về phía đầu tip, giúp hỗ trợ việc đưa vào ống mật một cách trơn tru hơn.

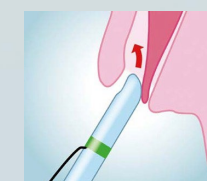

*1 WGC: Đưa ống thông dẫn hướng bằng dây

Dao cắt cơ vòng, loại V

Dao cắt cơ vòng, loại V Preloaded



CleverCut 3V có sẵn dây dẫn

- Thiết kế dao cắt cơ vòng với tích hợp sẵn dây dẫn hướng giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thực hiện thủ thuật.

Thông số kỹ thuật

Dao cắt cơ vòng, loại V (Loại đầu tip có đường đi cho dây dẫn)

Model	Loại đầu tip	Dây dẫn tương thích (inch)	Chiều dài đầu tip (mm)	Chiều dài dao (mm)	
KD-VC431Q-0720	Loại đầu tiêu chuẩn	0,025	7	20	
KD-VC431Q-0730				30	
KD-VC411Q-0320		0,035	3	7	20
KD-VC411Q-0330					30
KD-VC411Q-0720		Loại uốn cong ngắn	0,035	7	20
KD-VC411Q-0725					25
KD-VC411Q-0730	Loại đầu nghiêng	0,025	7	30	
KD-VC412Q-0215				15	
KD-VC433Q-0720				20	
KD-VC433Q-0730				30	

Dao cắt cơ vòng, loại V Preloaded (Loại đầu tip có đường đi cho dây dẫn)

Model	Dụng cụ cắt cơ vòng				Dây dẫn có sẵn				
	Loại đầu tip	Dây dẫn tương thích (inch)	Chiều dài đầu tip (mm)	Chiều dài dao (mm)	Đường kính (inch)	Chiều dài làm việc (mm)	Hình dạng đầu tip	Loại dây dẫn	
KD-VC631Q-07201S	Loại đầu tiêu chuẩn	0,025	7	20	0,025	2700	Thẳng	VisiGlide	
KD-VC631Q-07201A				30			Đầu góc		
KD-VC631Q-07301S		0,035		20	0,035		Thẳng		
KD-VC631Q-07301A				30			Đầu góc		
KD-VC611Q-07201S		0,025		20	0,025		Thẳng		VisiGlide 2
KD-VC611Q-07301A				30			Đầu góc		
KD-VC631Q-07203S		0,035	20	0,035	Thẳng				
KD-VC631Q-07203A			30		Đầu góc				
KD-VC631Q-07303S		0,025	20	0,025	Thẳng				
KD-VC631Q-07303A			30		Đầu góc				
KD-VC611Q-07203S			0,035		20	0,035	Thẳng		
KD-VC611Q-07203A					30		Đầu góc		
KD-VC611Q-07303S		0,035	20	0,035	Thẳng				
KD-VC611Q-07303A			30		Đầu góc				

Thông số kỹ thuật, thiết kế và phụ kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc cam kết từ phía nhà sản xuất.