

OLYMPUS[®]

Your Vision, Our Future

OLYMPUS
EndoTherapy
BEYOND THE SCOPE

Đầu uốn linh hoạt mới cho phép điều hướng trơn tru và dễ dàng hơn trong quá trình thông nhú trong thủ thuật ERCP



ERCP Cannula
SwingTip
cannula™

Olympus giới thiệu một ống thông mới với khả năng gập góc đầu độ cong, được thiết kế cho những trường hợp khó thông nhũ



Với thiết kế cải tiến, ống thông PR-233Q SwingTip™ giúp đơn giản hóa và tăng độ tin cậy cho thao tác thông nhũ trong kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), vốn là một thủ thuật phức tạp. Nhờ khả năng gập góc đầu, PR-233Q dễ dàng được đưa vào và định vị trong đường mật, cho phép điều hướng chính xác và có chọn lọc. Ống thông SwingTip™ giúp việc đưa vào ống gan trái trở nên đơn giản và thuận lợi hơn.

Đặc điểm

- **Khả năng gập góc giúp đưa vào dễ dàng hơn**
Đầu thuôn của PR-233Q có thể gập góc tối đa 90° khi kéo tay cầm và tối đa 30° khi đẩy, giúp việc đưa ống thông vào nhũ tá tràng và đường mật trở nên dễ dàng hơn, kể cả trong những ca khó.
- **Đầu platinum cân quang**
Đầu ống được làm bằng platinum, có độ hiển thị rất tốt, giúp dễ dàng xác định vị trí của đầu ống trong quá trình chụp X-quang tăng sáng.
- **Tương thích với dây dẫn hướng 0,035"**
Mặc dù đầu ống có thiết kế thuôn nhỏ, nhưng vẫn có thể luồn dây dẫn có đường kính lên đến 0,035" (0,89 mm) qua ống thông.
- **Vạch đánh dấu ở đầu xa giúp xác nhận vị trí**
Các vạch màu xanh được đặt cách nhau 3 mm trên đầu xa của ống thông, giúp dễ dàng xác định độ sâu đưa vào. Ngoài ra, còn có một vạch màu xanh lá, cho biết khi phần uốn cong của ống thông đã hoàn toàn vượt ra khỏi đầu ống soi, giúp người dùng biết thời điểm đạt được khả năng gập góc tối ưu.
- **Thiết kế vô trùng dùng một lần**
Với tay cầm ngăn tích hợp, PR-233Q được thiết kế vô trùng và dùng một lần.



Thông số kỹ thuật

Thiết kế đầu Tip	Thuôn
Model	PR-233Q
Đường kính ngoài	I Ống Ø 2,95 mm I Đầu cuối 4.0 Fr.
Dây dẫn tương thích	0,035" (0,89 mm)
Đường kính kênh tối thiểu	Ø 3,2 mm

Thông số kỹ thuật, thiết kế và phụ kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước và không tạo bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nhà sản xuất.

OLYMPUS

www.olympus.com

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Nhật Bản
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS EUROPA GMBH
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg / Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Đức
OLYMPUS AMERICA INC.
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, Hoa Kỳ
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
5301 Blue Lagoon Drive, Suite 290, Miami, Florida 33126-2097, Hoa Kỳ
OLYMPUS KEYMED GROUP LTD.
Keymed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, Vương quốc Anh
OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373, Singapore

OLYMPUS HONG KONG AND CHINA LIMITED
L43, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hồng Kông
OLYMPUS (BEIJING) SALES & SERVICE CO., LTD.
Room 1202, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, Trung Quốc
OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
117071, Moscow, Malaya Katuzhskaya 19, bld. 1, fl. 2, Nga
OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD
31 Gilby Road, Mount Waverley, VIC 3149, Úc
OLYMPUS KOREA CO., LTD.
4F, 5F, Gyeongang Bldg., 157-27, Samseong-dong, Gangnam-ku, Seoul, Hàn Quốc

In tại Nhật Bản F905SB-1108