

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỪ TRƯỜNG TOÀN THÂN

MODEL: BIOMAG Lumina 3D-e

CHỦ SỞ HỮU: BIOMAG Medical S.R.O

HÃNG SẢN XUẤT: Karel Hrnčíř – BIOMAG

1. Cách sử dụng

Chuẩn bị trước khi điều trị

- Đặt bệnh nhân ở tư thế thoải mái, có thể nằm hoặc ngồi tùy theo vị trí cần điều trị.
- Kiểm tra thiết bị, dây nguồn, dây nối applicator để đảm bảo không có hỏng hóc.
- Lau sạch vùng da cần điều trị, sau đó đặt một lớp bảo vệ như khăn sạch hoặc tấm lót dùng một lần giữa da và applicator.
- Không đặt applicator trực tiếp lên vết thương hở, loét hoặc vùng da đang chảy máu.

Kết nối thiết bị

- Dùng dây nguồn cắm máy vào ổ điện. Máy sẽ phát âm báo và hiển thị màn hình khởi động.
- Kết nối từ 1 đến 4 applicator vào các cổng phía dưới thiết bị.
- Đặt applicator lên vùng cơ thể cần trị liệu, bảo đảm tiếp xúc thoải mái và cố định chắc chắn nếu cần.

Chọn chương trình điều trị

- Nhấn nút bên trái để mở danh sách toàn bộ chương trình, hoặc nút bên phải để mở danh sách các chương trình sử dụng thường xuyên.
- Dùng phím lên/xuống để chọn chương trình phù hợp với tình trạng sức khỏe (giảm đau, chống sưng, thư giãn cơ, giãn mạch, giải độc, phục hồi...).
- Ở chế độ EASY: máy tự chạy chương trình mặc định 20 phút, không cần cài đặt thêm.
- Ở chế độ CLINIC: có thể điều chỉnh thời gian (5–90 phút) và cường độ (1–100%) theo nhu cầu hoặc chỉ định của bác sĩ.

Khởi động và theo dõi trị liệu

- Nhấn nút trung tâm để bắt đầu.
- Trong quá trình trị liệu, bệnh nhân nên thư giãn, không cần tháo bỏ quần áo hoặc băng bó, vì từ trường xuyên qua vải và thạch cao.
- Màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng sau 5 phút không thao tác.
- Khi chương trình kết thúc, máy sẽ phát âm báo và hiển thị thông tin trên màn hình.

Kết thúc trị liệu

- Nhấn nút trung tâm để dừng chương trình.



- Nếu muốn tắt máy, giữ nút trong 6 giây và chọn YES.
- Trường hợp sử dụng pin, thiết bị sẽ tự động tắt sau 6 phút không hoạt động.

Khuyến nghị sử dụng: Trung bình 2 lần mỗi ngày, trường hợp nặng có thể 3 lần/ngày. Mỗi đợt trị liệu nên duy trì ít nhất 2 tuần. Với bệnh mạn tính, có thể áp dụng lâu dài theo hướng dẫn của bác sĩ.

2. An toàn và bảo quản

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, chỉ người đã được hướng dẫn mới được phép vận hành máy.
- Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm, phòng xông hơi.
- Tránh để thiết bị gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Không quấn dây điện quanh cổ, không kéo căng hoặc bẻ gập dây nguồn.
- Trong khi điều trị, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa applicator và các thiết bị nhạy cảm như đồng hồ, thẻ từ, thẻ tín dụng, ổ cứng.
- Nếu nhiều bệnh nhân cùng sử dụng, cần khử khuẩn applicator trước mỗi lần đổi người.
- Không tự ý tháo rời, chỉnh sửa hoặc thay thế phụ kiện không chính hãng.
- Khi vận chuyển hoặc cất giữ, để thiết bị nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập mạnh.
- Nhiệt độ lưu trữ thích hợp từ -25 °C đến +70 °C, độ ẩm 15–93% không ngưng tụ.

3. Bảo trì và kiểm tra định kỳ

- Vệ sinh thiết bị và applicator bằng khăn mềm cùng dung dịch khử khuẩn không chứa cồn (ví dụ: Sani-Cloth® Active).
- Không dùng dung môi, xăng hoặc các chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm hỏng bề mặt.
- Đối với thiết bị có pin Lithium: cần sạc đúng cách, không để pin cạn kiệt lâu ngày.
- Lịch kiểm tra khuyến nghị:
 - + Cơ sở y tế: lần đầu sau 2 năm, sau đó mỗi 12 tháng; sau 8 năm thì mỗi 6 tháng.
 - + Người dùng tại nhà: lần đầu sau 2 năm, sau đó mỗi 24 tháng.
 - + Thiết bị có pin Lithium: kiểm tra ít nhất mỗi 12 tháng.



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Đào Văn Bắc