

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỪ TRƯỜNG TOÀN THÂN

MODEL: BIOMAG Lumio 3D-e

CHỦ SỞ HỮU: BIOMAG Medical S.R.O

HÃNG SẢN XUẤT: Karel Hrnčíř – BIOMAG

1. Cách sử dụng thiết bị

Chuẩn bị trước khi trị liệu

- Đặt bệnh nhân ở tư thế thoải mái, có thể ngồi hoặc nằm.
- Kiểm tra máy, dây nguồn và applicator để đảm bảo an toàn.
- Vệ sinh vùng da cần điều trị, dùng khăn sạch hoặc tấm lót dùng một lần để cách ly applicator khỏi da.

Kết nối thiết bị

- Kết nối máy với nguồn điện bằng dây đi kèm.
- Gắn applicator vào cổng đầu ra ở phía dưới máy. Model Lumio 3D-e hỗ trợ nhiều loại applicator (vòng, tấm, tại chỗ) và có thể kết nối cùng lúc 1–2 applicator.
- Đặt applicator trực tiếp gần vị trí cần điều trị, bảo đảm cố định vững chắc.

Chọn chương trình điều trị

- Nhấn nút để mở danh sách chương trình.
- Dùng phím điều hướng chọn chương trình thích hợp (giảm đau, chống sưng, thư giãn cơ, giãn mạch, giải độc, phục hồi...).
- Ở chế độ **EASY**: máy tự chạy chương trình mặc định 20 phút.
- Ở chế độ **CLINIC**: có thể điều chỉnh thời gian (5–90 phút) và cường độ (1–100%) theo nhu cầu hoặc chỉ định y tế.

Khởi động và theo dõi

- Nhấn nút trung tâm để bắt đầu trị liệu.
- Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nên thư giãn. Từ trường có thể xuyên qua quần áo, băng bó hoặc lớp thạch cao mỏng.



- Khi kết thúc, máy sẽ báo âm thanh và hiển thị trên màn hình.

Kết thúc

- Nhấn nút trung tâm để dừng chương trình.

- Để tắt máy, giữ nút trong vài giây và chọn YES.

- Nếu dùng pin, máy sẽ tự động tắt khi không hoạt động trong 6 phút.

Khuyến nghị: Thực hiện 2 lần mỗi ngày, có thể 3 lần/ngày trong trường hợp nặng. Liệu trình tối thiểu 2 tuần, các bệnh mạn tính có thể kéo dài hơn theo tư vấn bác sĩ.

2. An toàn và bảo quản

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy.

- Không dùng trên vùng da hở, loét, nhiễm trùng.

- Tránh môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.

- Không để gần nguồn nhiệt, không để nước chảy vào thiết bị.

- Đặt cách tối thiểu 1 mét với tủ, đồng hồ, thiết bị điện tử nhạy cảm.

- Nếu nhiều bệnh nhân cùng sử dụng, cần khử khuẩn applicator giữa mỗi lần.

- Không tự ý tháo rời hoặc thay thế phụ kiện không chính hãng.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập. Điều kiện lưu trữ: nhiệt độ -25 °C đến +70 °C, độ ẩm 15–93% không ngưng tụ.

3. Bảo trì và kiểm tra định kỳ

- Vệ sinh bằng khăn mềm và dung dịch sát khuẩn không chứa cồn (ví dụ: Sani-Cloth® Active).

- Không dùng dung môi, cồn hoặc hóa chất mạnh vì có thể làm hỏng bề mặt.

- Nếu máy sử dụng pin Lithium, cần sạc đúng cách và tránh để pin xả cạn lâu ngày.

- Kiểm tra kỹ thuật định kỳ:

+ Cơ sở y tế: lần đầu sau 2 năm, sau đó mỗi 12 tháng; sau 8 năm, mỗi 6 tháng.

+ Người dùng tại nhà: lần đầu sau 2 năm, sau đó mỗi 24 tháng.

33740
CÔNG
TNH
HƯƠNG
DỊCH
NH I
S MAI

+ Thiết bị có pin Lithium: cần kiểm tra ít nhất 12 tháng một lần.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Đào Văn Bắc

