




BÌNH HÚT DẪN LƯU MÀNG PHỔI KÍN

Phạm vi ứng dụng:

Sản phẩm này được sử dụng cho những bệnh nhân cần đặt ống dẫn lưu kín sau các loại phẫu thuật lồng ngực khác nhau và điều trị tràn dịch và tràn khí màng phổi

Sản phẩm đã được khử trùng bằng khí EO và có thời gian sử dụng trong vòng 5 năm sau 14 ngày kể từ khi chương trình khử trùng kết thúc.

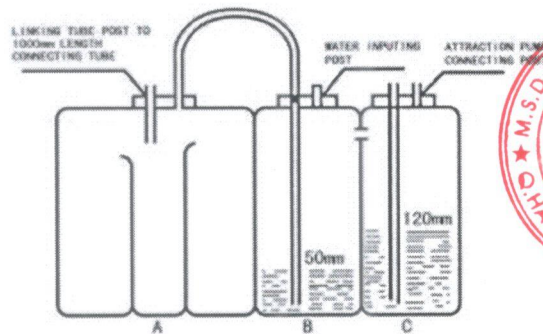

CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Oanh

Hướng dẫn sử dụng cụ thể:

1. Mở giá đỡ di động bên dưới chai sau khi đã mở túi đóng gói. Đổ dung dịch muối sinh lý vô trùng vào chai “B” cho đến khi mực nước đạt vạch “8CM”. Đổ dung dịch muối sinh lý vô trùng vào chai “C” cho đến khi mực nước đạt vạch “12CM”. Sau đó, vặn chặt nắp chai “B”.
2. Nối bình “A” và bình “B” bằng ống nối dài 420mm (đường kính trong của ống nối là 10mm).
3. Nối một đầu của ống dẫn lưu dài 1000mm (đường kính trong của ống nối là 8mm) với đầu nối ống dẫn lưu trên chai “A” (đường kính ngoài là 9mm). Đầu còn lại của ống dẫn lưu dài 1000mm cần được nối với van hai chiều, sau đó có thể nối với ống dẫn lưu ngực.
4. Khi yêu cầu nguồn hút áp lực âm, hãy kết nối nguồn hút áp lực âm với đầu nối hút trên chai “C”.

Thận trọng:

1. Sản phẩm cần được bảo quản trong phòng thông gió, sạch sẽ, không có khí ăn mòn xung quanh.
2. Ngừng sử dụng ngay lập tức khi phát hiện bình bị vỡ hoặc rò rỉ,...
3. Cố gắng chọn khóa hai chiều và ống dẫn lưu ngực có kích thước chính xác phù hợp với ống dẫn lưu đã được gắn kèm.
4. Sau khi hoàn tất quá trình hút dẫn lưu, đổ hết chất lỏng ra khỏi bình và vứt bỏ bình theo quy định của bệnh viện. Bình được thiết kế để sử dụng một lần./.