

### Hướng dẫn sử dụng/Instructions For Use:


Lựa chọn kích cỡ phù hợp với số đo vòng ngực, kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng rồi tiến hành các bước sau:

- Tư thế bệnh nhân: ngồi, hai tay chống mạn sườn, uốn ngực.
  - Lấy sản phẩm ra khỏi túi, mở rộng, kiểm tra các dây đai ở tư thế mở.
  - Đeo, lắp sản phẩm nhẹ nhàng, tránh gây đau cho bệnh nhân tùy theo các tư thế. Cố định từng nấc từ lỏng đến chặt (đủ chắc, không gây đau hay chèn ép).
  - Kiểm tra cử động các khớp liên kề ở tư thế cho phép đối với từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
  - Căn dặn bệnh nhân giữ tư thế cố định cần thiết, kiểm tra định kỳ thời hạn cố định cho từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- Choose suitable size with chest circumference, check the product before use then follow these steps:*
- *Posture of patient: Sitting, putting hands on side of flank, pushing chest out.*
  - *Remove the product from the bag, wide-opening, check the product with opening all of straps.*
  - *Wear, use product gently, avoid causing pain to the patient depending on the postures. Fix each step from loose to tight (strong enough, no pain or pinching).*
  - *Check the movement of adjacent joints in the allowed postures for each specific injury as directed by a specialist.*
  - *Recommend patient to maintain fixed posture necessarily, periodically check the fixed term for each specific injury as assigned by a specialist.*

### Bảng cỡ & Mã số sản phẩm/Size and product code:

Cỡ đai/Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Số đo vòng ngực/ Chest circumference (cm)	41-51	51-61	61-75	75-85	86-95	96-105	>105
Mã số sản phẩm/ Product code	140.OBD						

## Hướng Dẫn Sử Dụng ĐAI SỐ 8 STANDARD Figure of Eight Standard

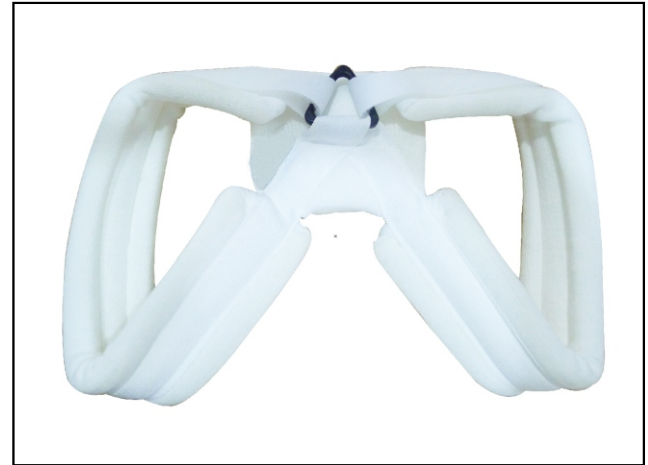

**Chức năng:**

- Neo ép, cố định xương đòn.

**Chỉ định:**

- Cố định chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn.
- Vỡ xương bả vai, trật khớp ức - đòn.
- Teo cơ delta, cơ ức - đòn - chũm.

**Vật liệu:**

- Vải ống thoáng khí, mút Foam PU.
- Băng nhám dính.

**Bảo quản:**

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt tay bằng nước có xà phòng, phơi khô nơi thoáng mát.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).

**Functions:**

- *Press and fix clavicle collar-bone.*

**Indications:**

- *Fix clavicle collar-bone fractured trauma and dislocated.*
- *Broken shoulder-blade, dislocated breastbone.*
- *Delta atrophy, sternocleidomastoid muscle.*

**Materials:**

- *Breathable rib knit fabric, PU Foam.*
- *Velcro fastener.*

**- Preservation:**

- *Putting in dry place.*
- *Washing by hands with soap and water, drying in cool place.*
- *Do not wash and dry by washing machine (No using bleach).*