


Hướng dẫn sử dụng/Instructions For Use:

- Tư thế bệnh nhân: Nằm hoặc ngồi.
- Lấy nẹp ra khỏi túi, mở rộng hoàn toàn các dây đai, kiểm tra dây đai ở tư thế mở.
- Đeo, lắp nẹp nhẹ nhàng, tránh gây đau cho bệnh nhân tùy theo các tư thế. Cố định từng nấc từ lỏng đến chặt (đủ chắc, không gây đau hay chèn ép).
- Kiểm tra cử động các khớp liên kề ở các tư thế cho phép đối với từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- Căn dặn bệnh nhân giữ tư thế cố định cần thiết, kiểm tra định kỳ thời hạn cố định cho từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- *Patient posture: Sitting or lying.*
- *Remove the brace from the bag, fully open the straps, check the belt in the open position.*
- *Wear, install the brace gently, avoid causing pain to the patient depending on the posture. Fix each step from loose to tight (strong enough, no pain or pinching).*
- *Check the movement of adjacent joints in the allowed posture for each specific injury as directed by the specialist.*
- *Instruct patients to maintain the necessary posture, periodically check the fixed term for each specific injury as directed by a specialist.*

Bảng cỡ & Mã số sản phẩm/Size and product code:

Tên sản phẩm /Product name	Nẹp cẳng chân ngắn Stabilizer / Short Lower leg Stabilizer						Nẹp cẳng chân dài Stabilizer / Long Lower leg Stabilizer			
Cỡ / Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L
MS sản phẩm /Product code	724.OBD						725.OBD			

Hướng Dẫn Sử Dụng NẸP CẰNG CHÂN STABILIZER *Lower leg Stabilizer*

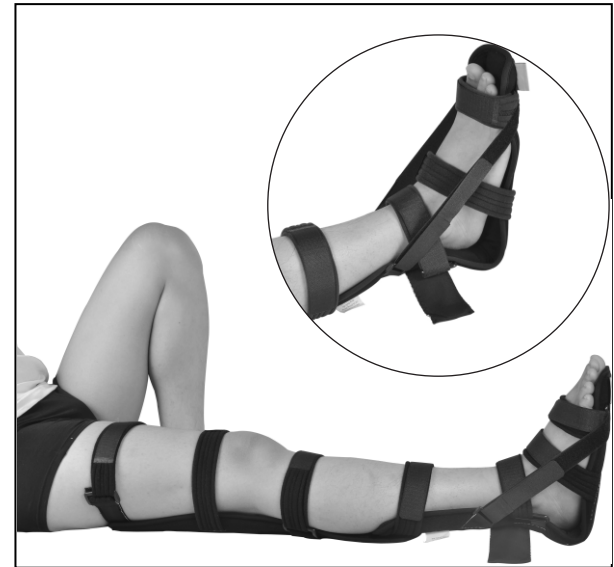

Chức năng:

- Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ.
- Chống xoay ở tư thế nằm của chân chấn thương.

Chỉ định:

- Gãy cổ xương đùi ở người già không có chỉ định phẫu thuật.
- Sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối cổ chân.
- Nẹp căng chân dài Stabilizer chỉ định cho những trường hợp như trên và cần giữ thẳng chân, chống co đầu gối.

Vật liệu:

- Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, mút Foam PU.
- Băng nhám dính.
- Bản nẹp hợp kim nhôm uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với 2 thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực.

Bảo quản:

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước xà phòng, phơi khô nơi thoáng.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).

Functions:

- Fixed, stabilized post-traumatic ankle joints, after surgery.
- Anti-rotation in lying position of leg injury.

Indications:

- Cervical neck fracture in elderly people with no indication for surgery.
- After surgery around the mortar, femoral neck, knee joints and ankle.
- Long Lower leg Stabilizer anti-rotation brace is indicated for the above cases, keeping the legs straight and preventing knee contraction.

Materials:

- Knitted fabric, mesh fabric, PU foam.
- Velcro fastener.
- Aluminum alloy splint bent to the foot curve, with two special reinforced splints.

Preservation:

- Putting in dry place.
- Washing by hands with soap and water, drying in cool place.
- Do not wash and dry by washing machine (No using bleach).