



CIS Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd



Comprehensive Innovative Services

## Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng Hướng dẫn sử dụng

**1 Mô tả sản phẩm:** Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng

**2 Mã sản phẩm:** Dòng LHI; dòng PPSU; dòng GSZ; tấm đệm và đai silicon.

**3 Cấu tạo:** Sản phẩm bao gồm hộp, khóa, nắp và các phụ kiện silicon.

**4 Phạm vi sử dụng:** Dùng để chứa dụng cụ trong quá trình đóng gói, tiệt trùng, vận chuyển, lưu trữ, v.v

**5 Nguyên vật liệu:**

1) Dòng LHI được làm từ hợp kim nhôm 5052 hoặc thép không gỉ 304. Phụ kiện làm từ silicon.

2) Dòng PPSU được làm từ polyphenylsulfone. Phụ kiện làm từ silicon.

3) Dòng GSZ được làm từ nhựa silicon. Phụ kiện làm từ silicon.

**6 Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng:**

1) Trước khi sử dụng, kiểm tra xem hộp có bị biến dạng và khóa có bị lỏng không.

2) Không áp dụng cho khử khuẩn bằng khí hoặc chất lỏng có tính ăn mòn

3) Tránh để dụng cụ sắc nhọn hoặc bề mặt mài mòn để tránh hư hỏng.

4) Nắp: Nắp ngoài có nhiều màu sắc để lựa chọn, giúp phân biệt giữa các quy trình phẫu thuật và các khoa/phòng.

5) Hình dạng: Hộp tiệt trùng có dạng hình chữ nhật, với các góc trong được bo tròn.

6) Làm sạch kỹ trước khi sử dụng lần đầu và kiểm tra định kỳ các dấu hiệu hao mòn hoặc biến dạng

7) Cách sử dụng: Dùng để chứa dụng cụ trong quá trình đóng gói và tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao.

- Điều kiện tiêu chuẩn: 121°C trong 15-30 phút, có thể tiêu diệt hiệu quả tất cả vi sinh vật, bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

- Điều kiện tiệt trùng nhanh: 134°C trong 4-6 phút, áp dụng cho nồi hấp tiệt trùng chân không trước.

8) Bề mặt hộp hợp kim nhôm có lớp oxit và có thể có vết xước nhẹ - đây là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

9) Màu sắc tùy chỉnh cần cung cấp mã Pantone chính xác, nếu không có thể xảy ra sai lệch màu.

10) Logo tùy chỉnh bằng khắc laser, vui lòng cung cấp file nguồn liên quan. Hiện chỉ chấp nhận định dạng .ai và .dwg.

11) Có thể tùy chỉnh giá đỡ dụng cụ bằng silicon theo yêu cầu của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu lâm sàng.

12) Tuổi thọ sử dụng: Trên 10 năm.

**7 Yêu cầu bảo quản:**

Sản phẩm nên được bảo quản trong môi trường không ăn mòn, phòng sạch, thông thoáng

**8 Thông tin liên hệ:**

1) Nhà sản xuất: CIS Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd

Địa chỉ sản xuất: 5th Floor, Building 3, Jinjulong Building, No. 9 Gaochu Road, Jiangning Development Zone, Nanjing City, 211100.

Điện thoại: +86 15895906933 E-mail: cissale@126.com

2) Công ty phân phối: YPS(Nanjing) Medical Hitech Co., Ltd.

Địa chỉ: 5th Floor, Building 1, Jinjulong Building 9#, Gaochu Road Nanjing City, China, 211100.

Điện thoại: +86 17326124858 E-mail: salc3@eismcdic.com

**9 Ngày ban hành hướng dẫn và phiên bản:** 01/08/2025.