

CÔNG TY TNHH ARIDENT

Số 11/13 đường Nguyễn Thông, tổ 8B, khu phố 5 An Bình, Phường Trần Biên, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ CHÍNH NHA

Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ chỉnh nha bao gồm:

- Thun chỉnh nha
- Thun chuỗi chỉnh nha
- Thun buộc mắc cài chỉnh nha
- Lò xo chỉnh nha
- Ống má chỉnh nha
- Mắc cài chỉnh nha
- Dây buộc kim loại chỉnh nha
- Móc chỉnh nha
- Dây cung chỉnh nha

Mục đích sử dụng:

Bộ dụng cụ chỉnh nha được sử dụng trong điều trị chỉnh nha. Sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa/chuyên gia chỉnh nha hoặc theo chỉ định và hướng dẫn của họ.

Chống chỉ định

Không sử dụng sản phẩm trong các trường hợp:

- Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc quá mẫn với vật liệu cấu thành sản phẩm (ví dụ: kim loại, latex hoặc các polymer)
- Tình trạng răng miệng không phù hợp để điều trị chỉnh nha (ví dụ: nhiễm trùng cấp tính chưa được kiểm soát, bệnh nha chu nặng)
- Các trường hợp khác theo đánh giá chuyên môn của bác sĩ nha khoa

Hướng dẫn sử dụng

- Sản phẩm được lắp đặt và điều chỉnh bởi bác sĩ nha khoa/chuyên gia chỉnh nha theo kế hoạch điều trị cụ thể



- Bệnh nhân cần tuân thủ các hướng dẫn về chăm sóc và sử dụng do bác sĩ cung cấp
- Một số thành phần có thể cần được thay thế định kỳ để đảm bảo hiệu quả điều trị
- Không tự ý tháo lắp, điều chỉnh hoặc thay đổi vị trí của dụng cụ

Tác dụng không mong muốn

Trong quá trình sử dụng, có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn như:

- Đau hoặc khó chịu nhẹ đến trung bình do lực chỉnh nha
- Kích ứng hoặc tổn thương mô mềm (niêm mạc, môi, má)
- Phản ứng dị ứng với vật liệu
- Viêm lợi, sâu răng hoặc các vấn đề nha chu nếu vệ sinh không tốt
- Di chuyển răng ngoài ý muốn hoặc kéo dài thời gian điều trị nếu không tuân thủ hướng dẫn
- Nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, cần liên hệ ngay với bác sĩ nha khoa

Cảnh báo

- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi hoặc dưới sự giám sát của bác sĩ nha khoa/chuyên gia chỉnh nha
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu không đảm bảo vô trùng (nếu áp dụng)
- Không sử dụng lại các sản phẩm dùng một lần
- Việc sử dụng không đúng cách có thể gây tổn thương mô mềm, răng hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị
- Một số sản phẩm có thể gây nguy cơ nuốt hoặc hít phải nếu bị bong hoặc rơi ra

Thận trọng

- Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị
- Kiểm tra định kỳ để đảm bảo các dụng cụ vẫn ở vị trí và hoạt động đúng chức năng
- Duy trì vệ sinh răng miệng tốt để giảm nguy cơ viêm nhiễm hoặc biến chứng
- Tránh các tác động cơ học mạnh (ví dụ: nhai thức ăn cứng, dai) có thể làm hỏng hoặc bong dụng cụ
- Thông báo ngay cho bác sĩ nếu có dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, kích ứng, hoặc dụng cụ bị lỏng

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ



- Tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao
- Giữ trong bao bì ban đầu (nếu có) cho đến khi sử dụng

