

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN KHANG DENTAL LAB
Địa chỉ trụ sở: 77/41/16-18, tổ 23, KP 35, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ nơi sản xuất: 77/41/16-18, tổ 23, KP 35, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Tên thiết bị y tế: **RĂNG SỨ KIM LOẠI**

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Bác sĩ kiểm tra nguyên nhân cần phải bọc Răng sứ kim loại cho bệnh nhân và xem vị trí nào cần bọc Răng sứ kim loại. Sau khi đã xác định xong, bác sĩ sẽ hướng dẫn và tư vấn cho bệnh nhân nên lựa chọn loại Răng sứ kim loại nào để phục hình cho hiệu quả.

Bước 2: Bác sĩ khám tổng quát cho bệnh nhân, xử lý răng hỏng, răng mất, xử lý các vấn đề liên quan đến vùng răng cần điều trị như các bệnh lý về nha chu, vấn đề về xương hàm ... và tiến hành lấy mẫu dấu răng.

Bước 3: Kỹ thuật viên chế tạo Răng sứ kim loại theo đúng dấu răng, màu sắc, chức năng và chỉ định của bác sĩ.

Bước 4: Kỹ thuật viên sẽ dùng các dữ liệu từ dấu răng của bệnh nhân và dùng hệ thống máy CAD/CAM để thiết kế cắt sườn kim loại chọn màu sắc thích hợp, kích cỡ để chọn phiôi sứ thích hợp sau đó sẽ nung trong lò nung với nhiệt độ rất cao để làm vật liệu co lại đến kích thước mẫu sáp. Sau khi để nguội sườn kim loại, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật sườn, đắp sứ lên bề mặt và sử dụng các kỹ thuật lên màu, xử lý bề mặt, tôi luyện cải thiện độ bền cho sản phẩm để hoàn thành sản phẩm Răng sứ kim loại.

Bước 5: Sát trùng và gắn tạm răng lên cùi răng.

Bước 6: Gắn kết thúc và tái khám định kỳ 6 tháng/lần

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



NGUYỄN QUANG BẢO