



THÀNH PHẦN

Chiết xuất keo ong, Tinh dầu húng chanh, Chiết xuất tỳ bà diệp, Glycerin, Menthol và phụ liệu.

Quy cách: Chai xịt ... ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Làm ẩm niêm mạc họng giúp làm dịu họng, giảm cảm giác đau rát, ngứa họng.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu ở họng trong trường hợp khàn tiếng, ho khan, ho có đờm, ho do cảm lạnh, cảm cúm, do thay đổi thời tiết, đặc biệt trong trường hợp khó chịu do ho về đêm.

Tạo lớp màng bảo vệ tại niêm mạc họng khỏi vi khuẩn, virus, phù hợp sử dụng hỗ trợ trong viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dành cho người lớn và trẻ từ 2 tuổi bị đau rát họng, ngứa họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản, ho khan, ho có đờm; người có nguy cơ cao mắc viêm nhiễm đường hô hấp. Lắc đều trước khi sử dụng.

Xịt vào họng 3-4 nhát/lần, sử dụng 2-3 lần/ngày.

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU


Bước 1: Lắp đầu xịt vào chai.

Bước 2: Để chai xịt trên mặt phẳng như mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn mạnh từ trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng "TÁCH" là đã lắp đúng vị trí.

Bước 3: Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu xịt.

Bước 4: Xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành sương mịn ở lần xịt đầu tiên.

Bước 5: Sử dụng xịt vào họng.

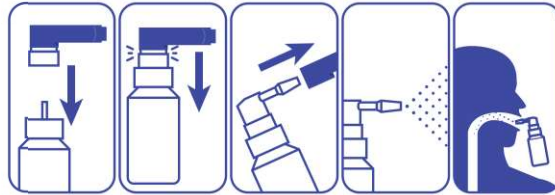

SỬ DỤNG CÁC LẦN TIẾP THEO

Bước 1: Mở nắp nhựa xanh bảo vệ đầu xịt ở ngoài cùng vòi xịt.

Bước 2: Đưa đầu xịt vào trong khoang miệng, ngay giữa họng và ấn xịt 3-4 nhát phủ đều vùng niêm mạc họng.

Bước 3: Vệ sinh sạch vòi xịt/ đầu xịt và nắp lại nắp nhựa như ban đầu để bảo quản cho lần sau sử dụng.



Sản phẩm có thể sử dụng cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cho con bú.

**Không dùng sản phẩm sau khi mở nắp lọ quá 1 tháng hoặc khi mở lọ không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu khác thường.*

**Sản phẩm chứa chiết xuất dược liệu nên có thể có lắng ở đáy lọ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.*

**Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm*

BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: Xem trên nhãn hộp.