

Số: 03/2017/ MINDRAY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

1. Kiểm tra trước khi Khởi động

Các yêu cầu môi trường:

Nhiệt độ: 5-40°C Độ ẩm: ≤85%

Các yêu cầu nguồn điện: AC220V±10%, AC110V±10%, 50/60Hz±1Hz

2. Mở máy

Kiểm tra điện áp vào theo yêu cầu cụ thể của quốc gia của bạn. Sau đó đặt “Công tắc điện” ở vị trí “|”. Sau đó máy thể hiện logo ngay trên màn hình và bắt đầu thực hiện quy trình tự kiểm tra và hiệu chuẩn phân cứng trong máy. Và sau đó máy sẽ thể hiện menu chính của hệ thống nếu không xảy ra lỗi.

3. Các tiến trình hoạt động

1) Các tùy chọn (nếu cần): Bấm Options trên menu chính, và sau đó cài đặt que thử, trị số tới hạn, phân loại và vv...

2) Xét nghiệm: Bấm Test trong menu chính, chọn kiểu xét nghiệm và số thứ tự mẫu và bắt đầu xét nghiệm.

4. Tắt máy

1) Nhấn Fun để hiển thị menu bật lên trong màn hình chính, chọn “Move In” bởi ▲ và ▼, và nhấn Start, sau đó bộ phận nạp mẫu bắt đầu di chuyển về vị trí lưu trữ.

2) Đặt công tắc điện đến vị trí “0”.

LƯU Ý: Bộ phận nạp mẫu cần phải được di chuyển đến vị trí “lưu trữ” trước khi tắt máy.

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM




XU QIANG
General Manager